


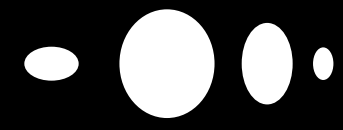


Premiers pas : création de compte, appairage, calibrage



Déballage



Déballage

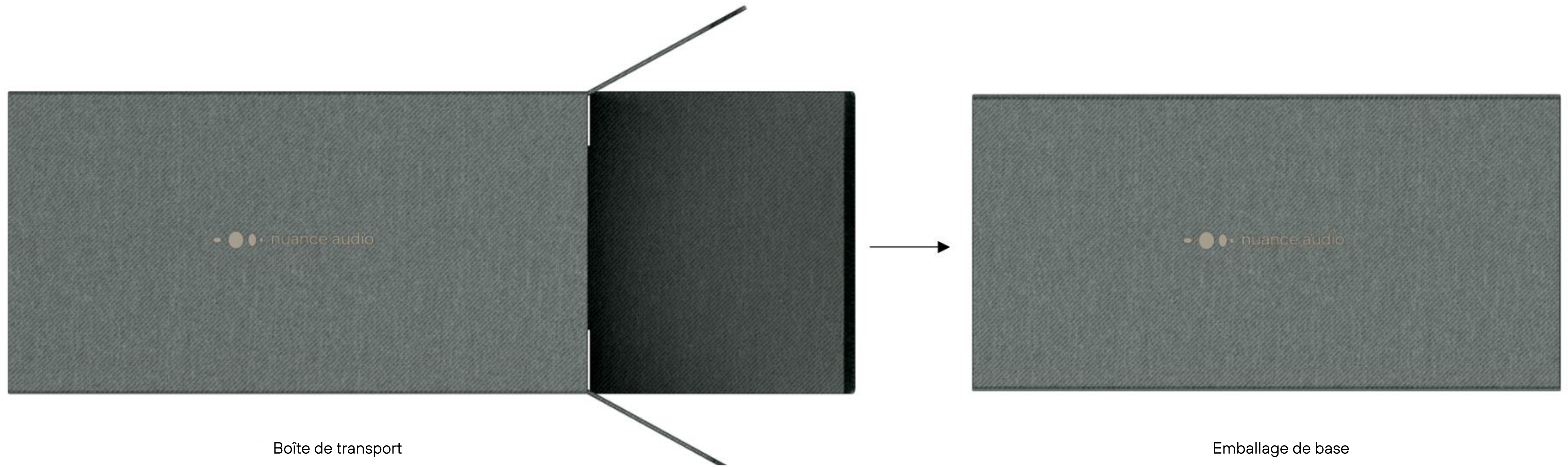





Déballage



Lunettes

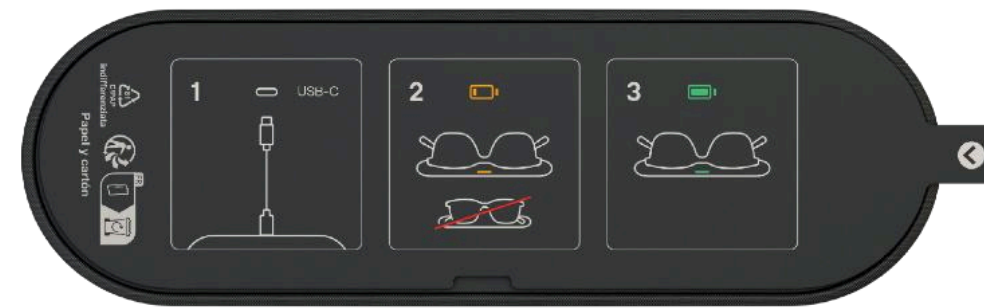

Station de recharge

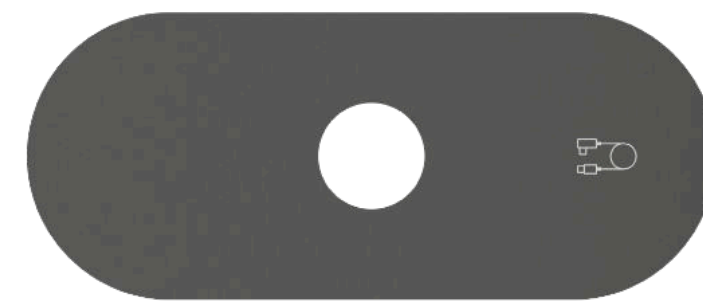


Enrouleur pour câble




Étui pliable



Enveloppe

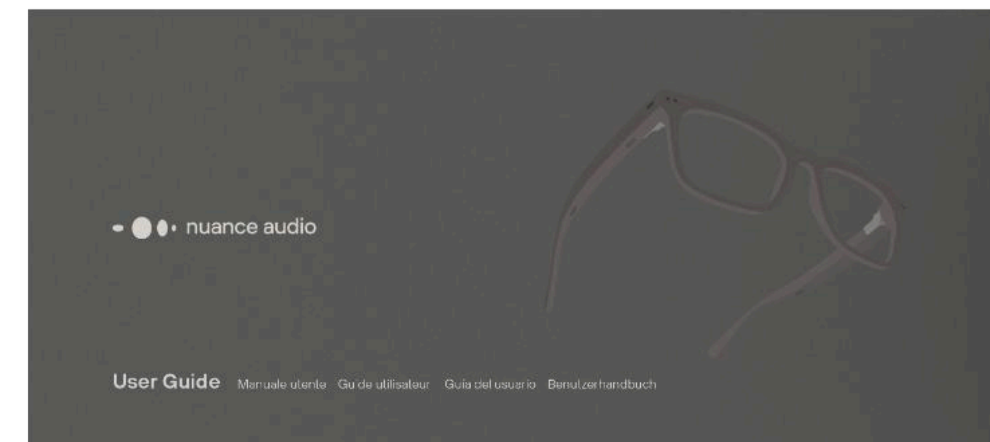


Guide d'utilisation

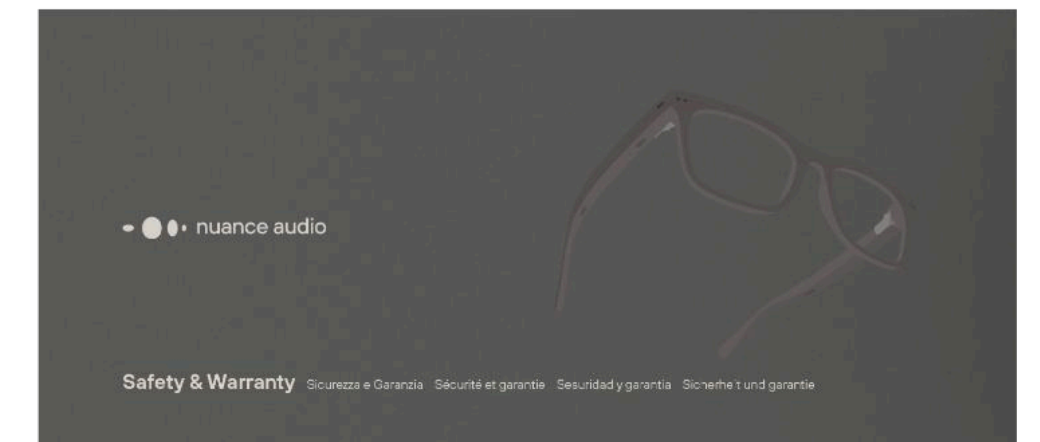

Sécurité et garantie



Enveloppe de chiffon de nettoyage + chiffon de nettoyage

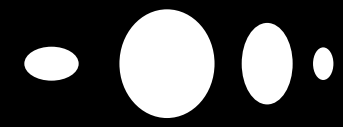


Activez et configurez vos lunettes Nuance Audio




Trouvez l'application Nuance Audio

Pour faciliter l'utilisation de vos lunettes Nuance Audio, notre application mobile intuitive vous permet de changer de mode audio, de régler le volume et de réduire le bruit de fond, directement depuis votre téléphone.

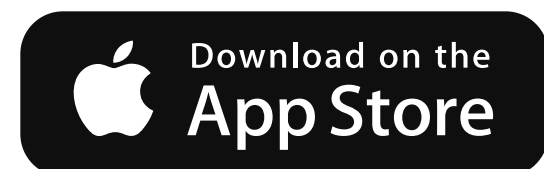


Option A.

Balayez le code QR avec votre téléphone et **téléchargez**

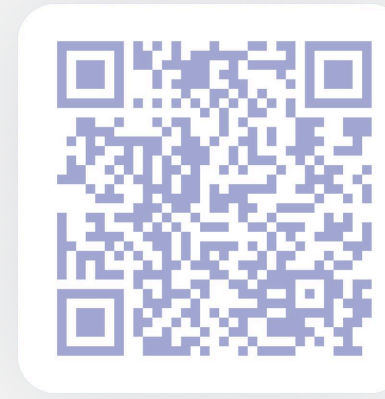


Remarques

Vous trouverez aussi le code QR sur la boîte principale

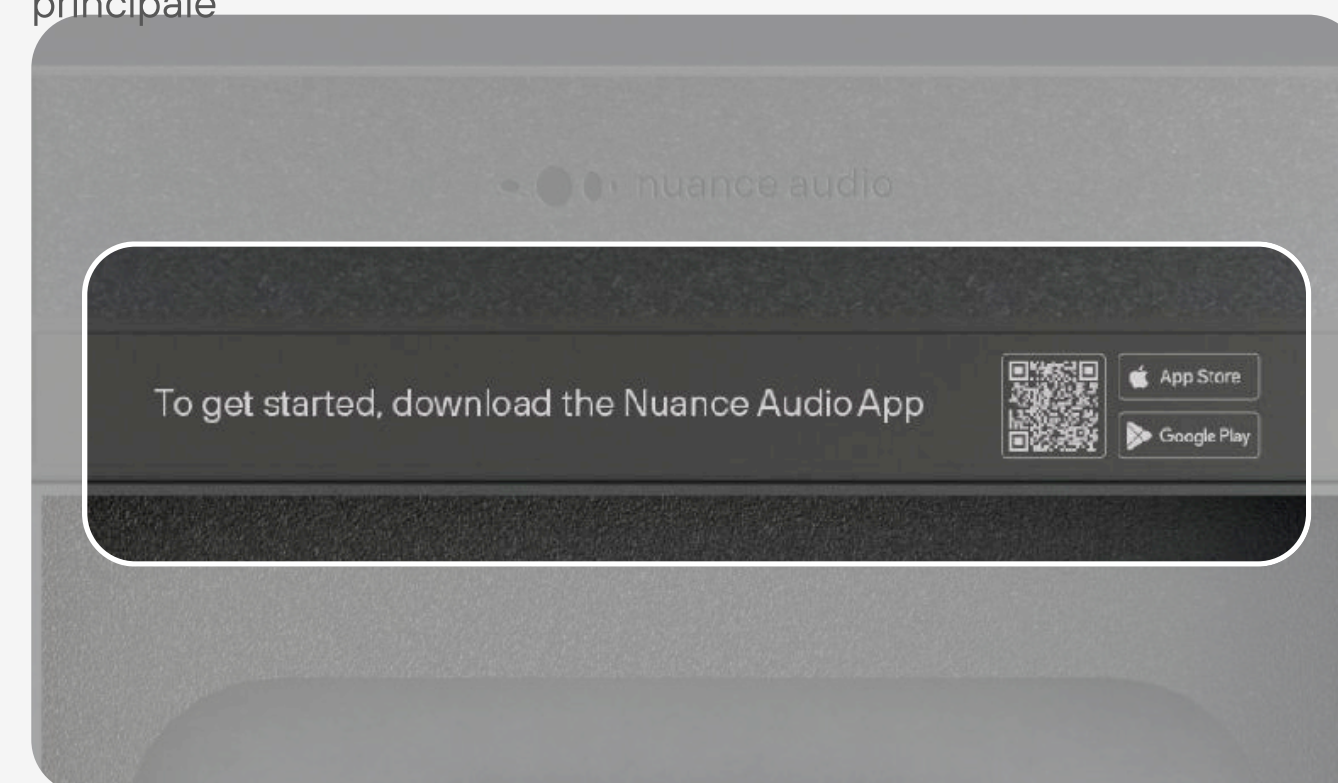

Option B.


Recherchez « Nuance Audio » sur l'App Store ou le Play Store de Google et **téléchargez**

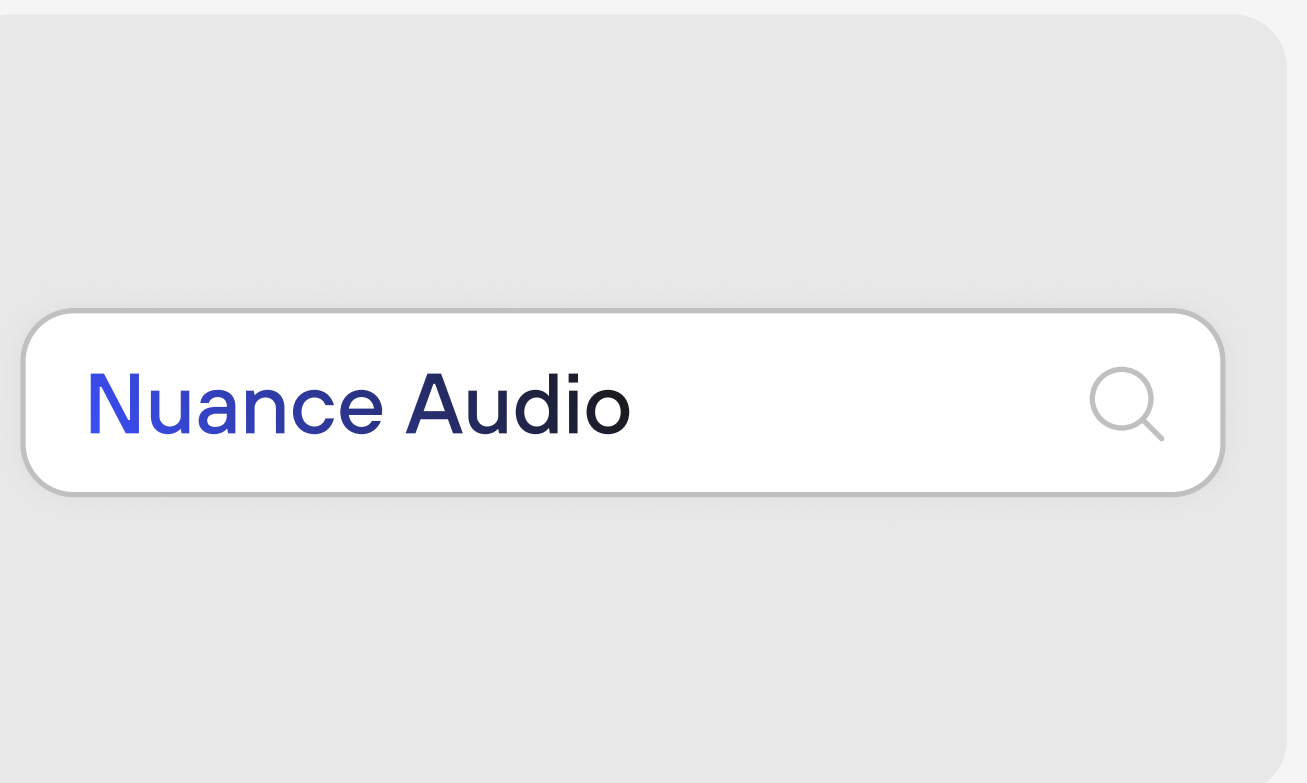




Téléchargez-la dans la boutique d'applications de votre appareil

Pour activer et personnaliser vos lunettes Nuance Audio, **téléchargez l'application Nuance Audio** à partir de l'App Store sur iOS ou Play Store de Google.

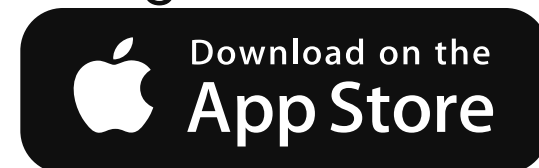


Apple App Store

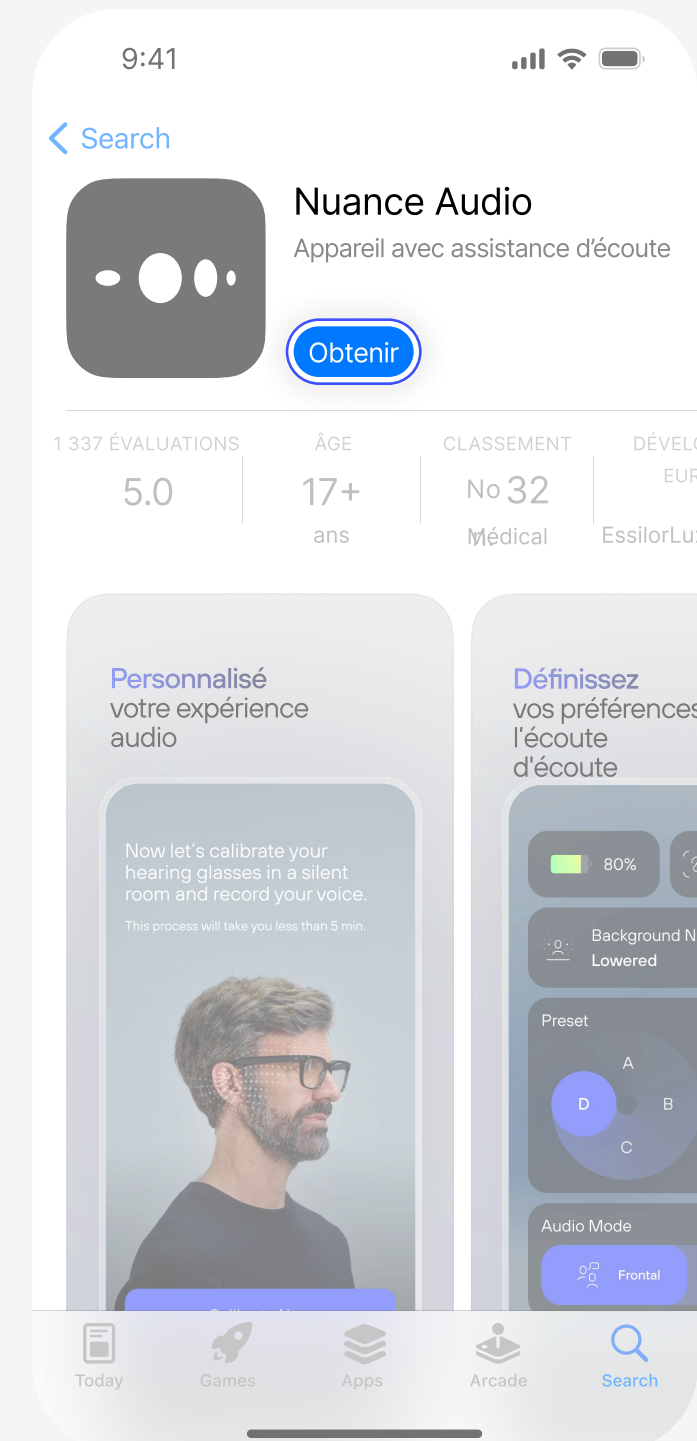

Recherchez « Nuance Audio » dans l'App Store d'iOS et appuyez sur « **Obtenir** »

Le bouton « Obtenir » se transformera en « Ouvrir ». Vous pouvez lancer l'application depuis l'App Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.

Google Play Store

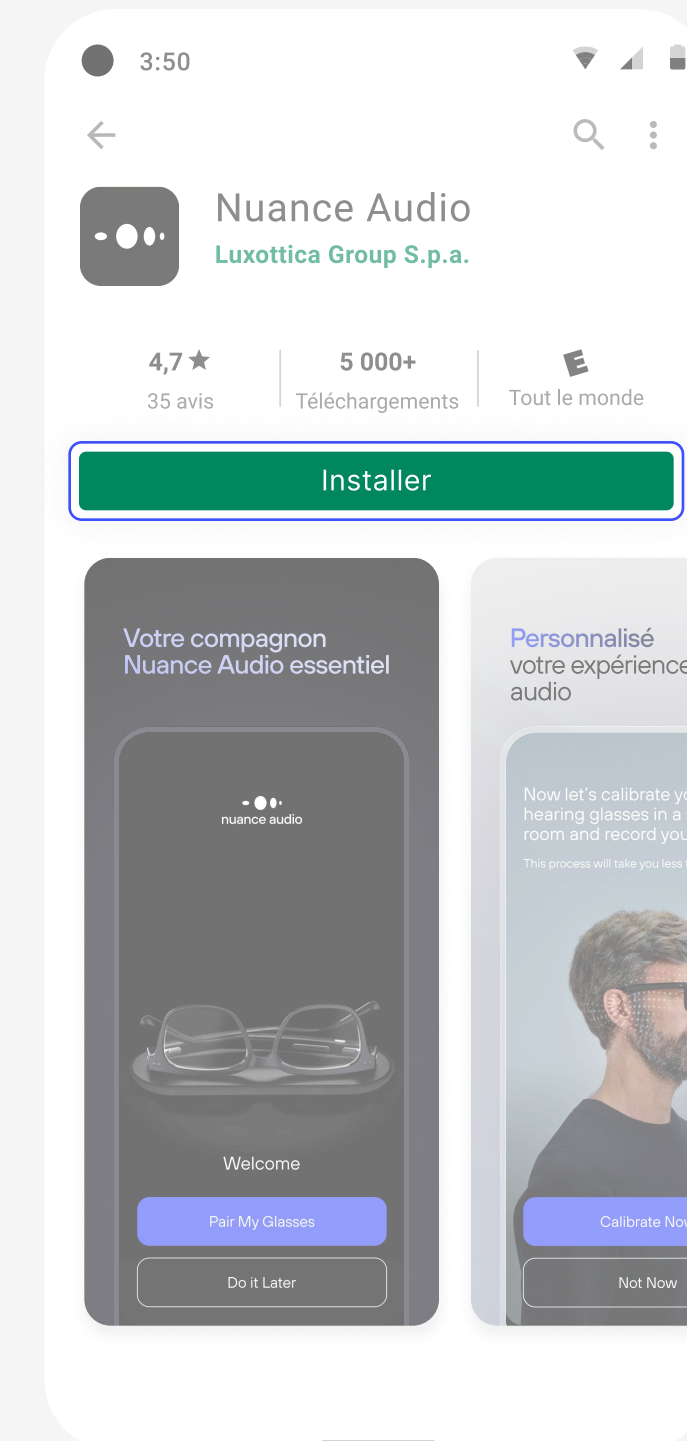

Recherchez « Nuance Audio » dans le Google Play Store et appuyez sur **Installer**

Le bouton « Obtenir » se transformera en « Ouvrir ». Vous pouvez lancer l'application depuis l'App Store ou la trouver sur votre écran d'accueil.



Inscrivez-vous

Une fois l'application téléchargée, vous pouvez procéder à votre inscription.

nuance audio

Connectez-vous à votre compte

Courriel

Mot de passe

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter

Vous n'avez pas de compte? [Inscrivez-vous](#)

Créez votre compte

Prénom*

Nom de famille*

Courriel*

Confirmez votre courriel*

Mot de passe

Date de naissance

Genre

La date de naissance et le sexe sont

Nuance Audio Il y a 34 minutes
Utilisez le code 123456 pour accéder à votre application Nuance Audio.

Entrez le mot de passe à usage unique reçu par courriel

1 1 1 1 1 1

Vérier

[Renvoyer le code](#)

nuance audio

Connectez-vous à votre compte

Courriel
johnsmith78@gmail.com

Mot de passe

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter


Vous n'avez pas de compte? [Inscrivez-vous](#)



Jumelage lunettes-téléphone



Commencez le jumelage.
Appuyez sur **Démarrer**

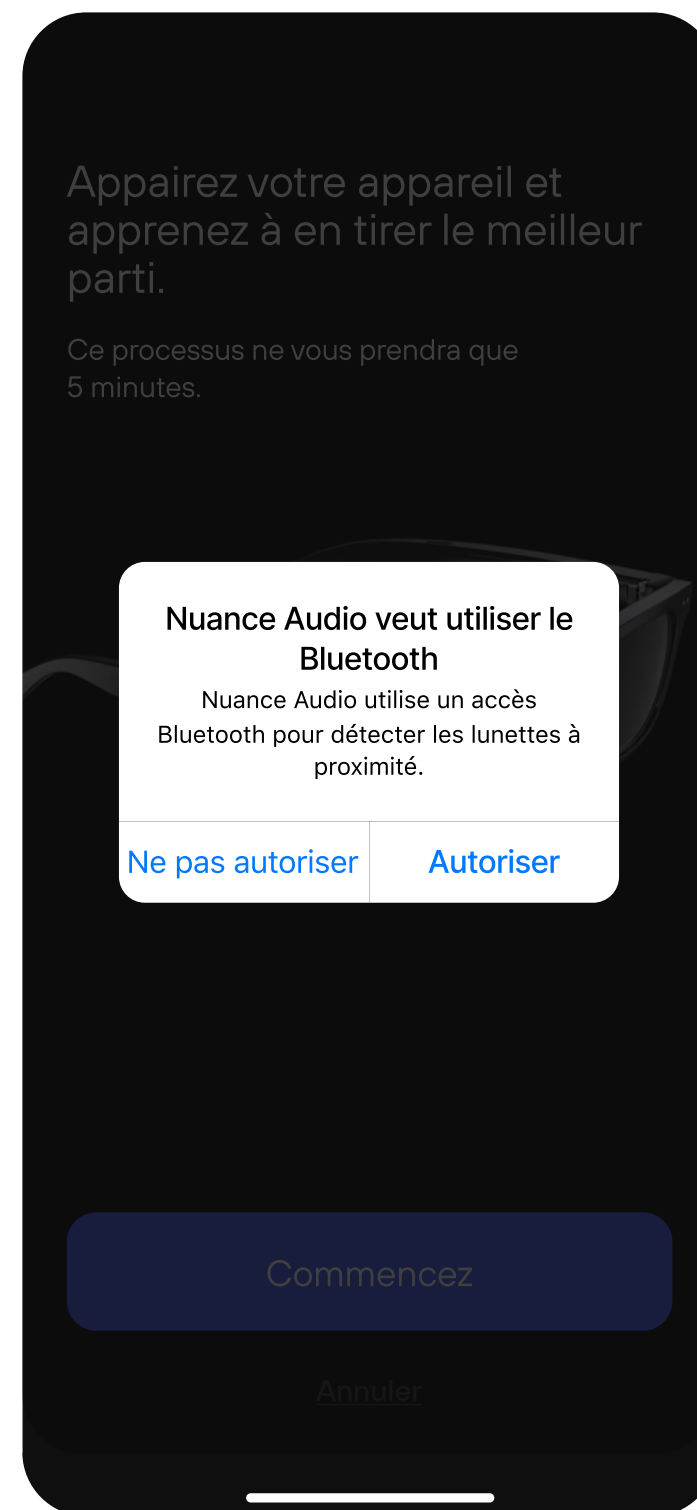

Autorisez l'accès
Bluetooth.
Appuyez sur **Autoriser**




Passez en mode jumelage
en **maintenant enfoncé
le bouton multifonction**
jusqu'à ce que le voyant
bleu clignote. .







Jumelage lunettes-téléphone

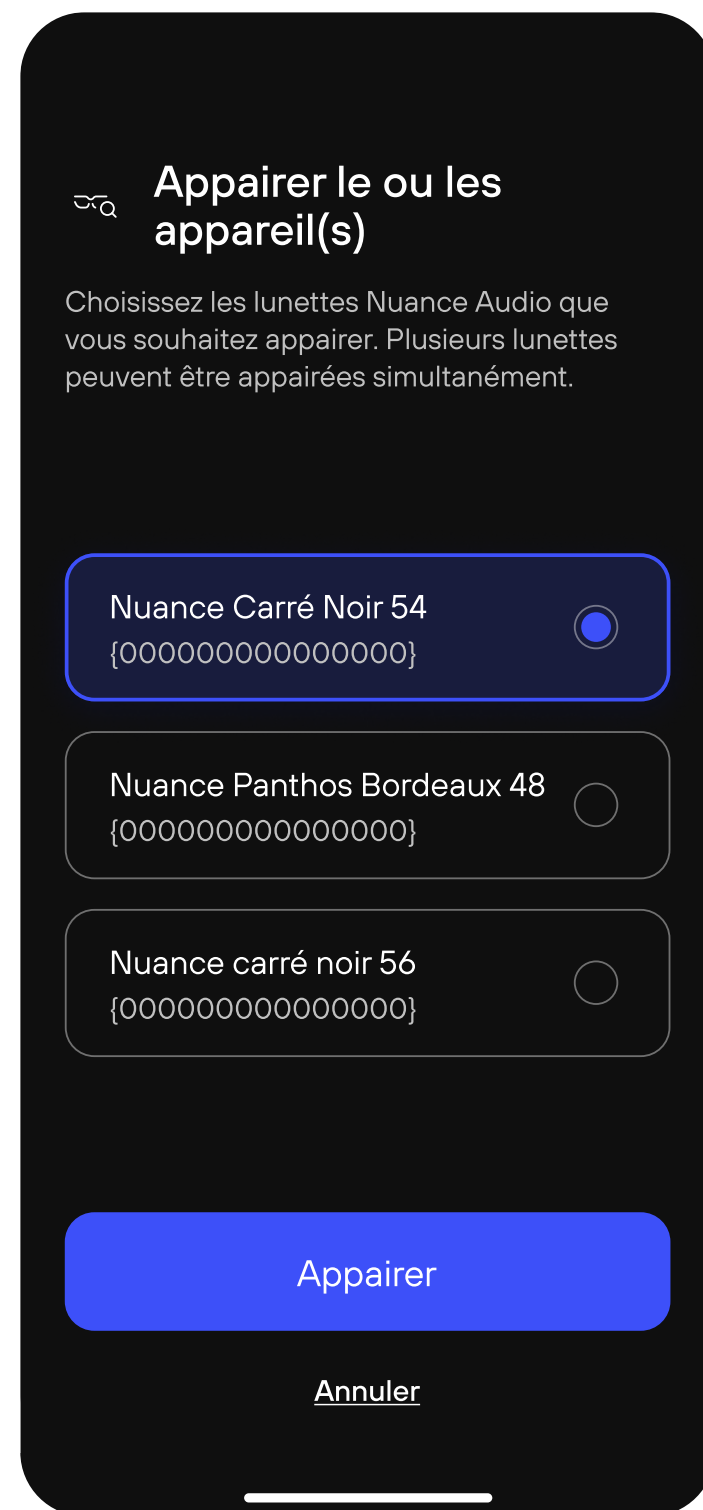

Sélectionnez les lunettes Nuance Audio dans la liste.
Appuyez sur **Appairer**

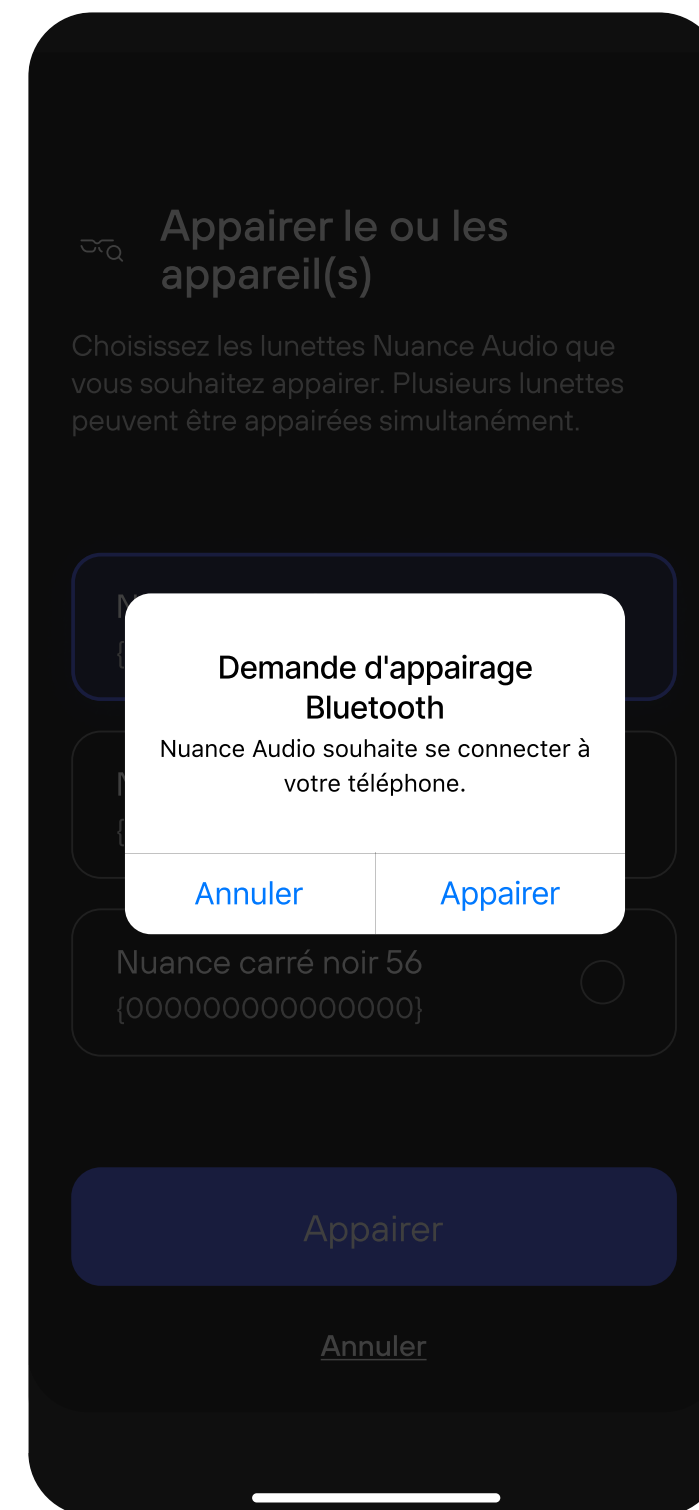

Acceptez la demande d'appairage depuis votre iPhone.
Appuyez sur **Appairer**

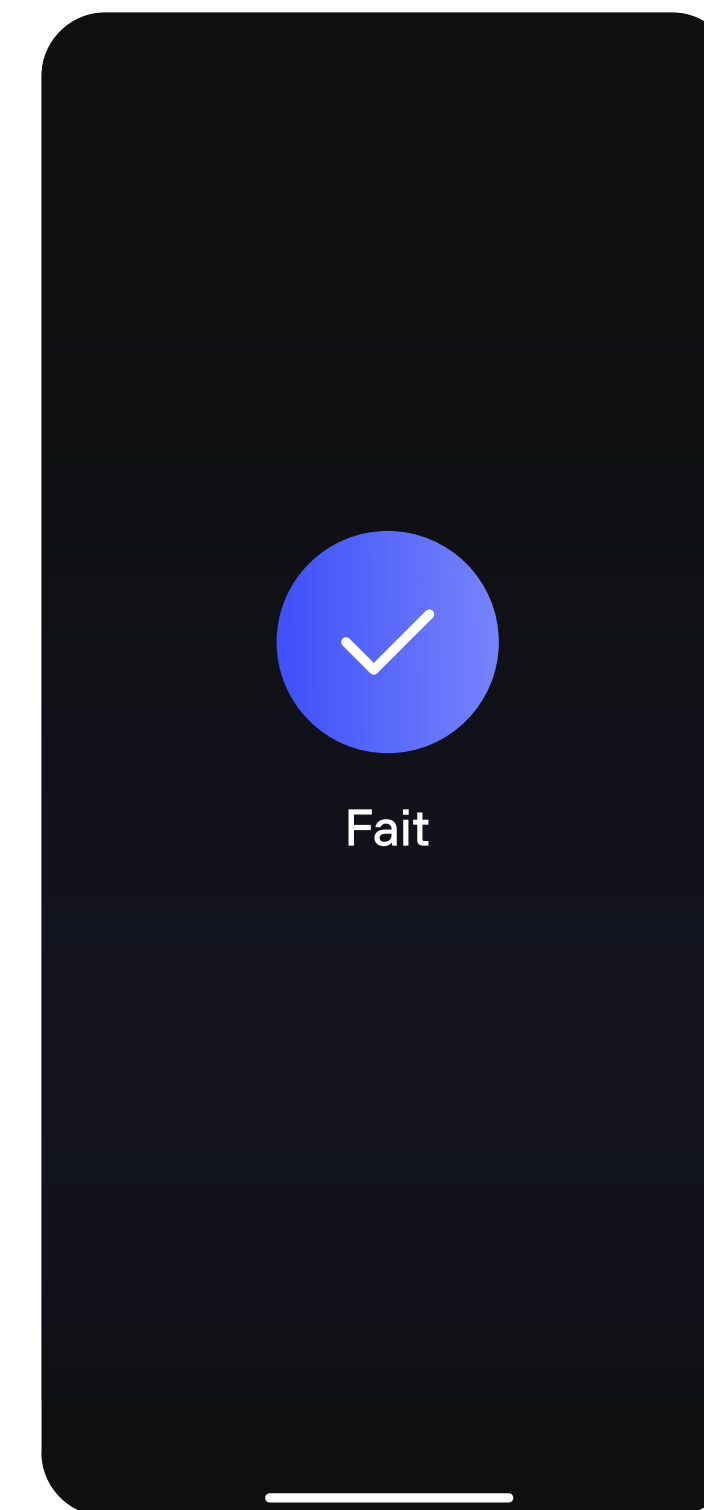

Appairage terminé.



Comment tirer le meilleur parti de votre calibrage?

Le calibrage ne prend qu'une minute et permet un fonctionnement optimal de vos lunettes Nuance Audio.

Si vous possédez plusieurs paires, calibrez-les individuellement.

Quelques conseils pour optimiser le calibrage personnel :

- Trouvez un endroit calme dans votre maison, en évitant les espaces grands ou ouverts.
- Éloignez-vous des zones comportant de nombreuses ou de grandes fenêtres.
- Évitez les pièces avec de hauts plafonds, où le bruit de fond peut être imprévisible.
- Éloignez-vous des coins et évitez de vous trouver face à un miroir.
- Idéalement, restez le plus près possible du centre de la pièce pour une qualité sonore optimale.
- Dernier conseil : votre chambre est souvent la meilleure option.

Quelques conseils pour optimiser le calibrage vocal :

- Parlez d'une voix claire et forte, sans crier.
- Projetez votre voix comme si vous vous adressiez à quelqu'un à l'autre bout de la pièce.
- Réduisez les pauses autant que possible.

Calibrage personnel




Le calibrage optimisera les performances audio de vos lunettes en tenant compte de la forme de votre tête, notamment :

- La réduction du retour acoustique
- L'atténuation de votre propre voix
-


Pour commencer le calibrage, trouvez une pièce silencieuse.

Appuyez sur **Commencer le calibrage**

Remarques
La fonction de calibrage se trouve dans les paramètres. Nous recommandons de refaire le calibrage tous les 6 mois.

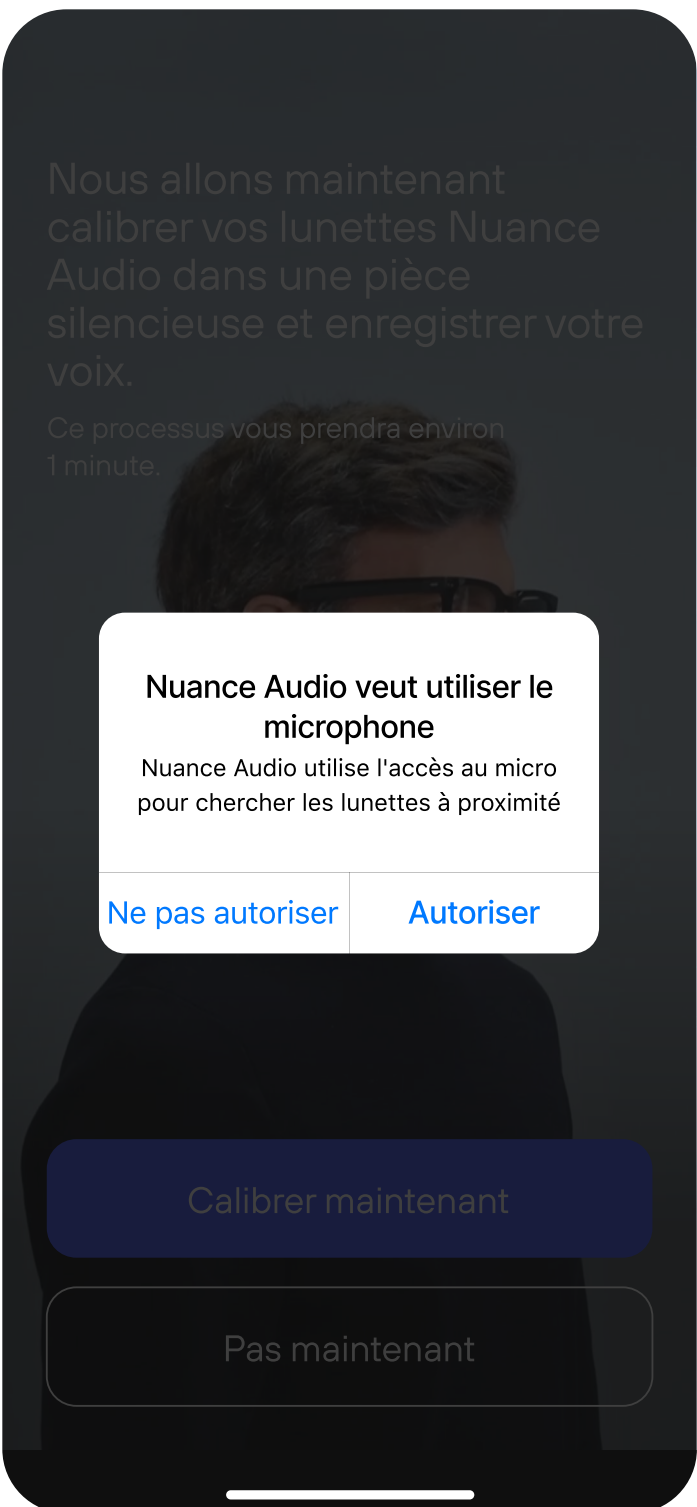


Autorisez le micro de votre téléphone pour pouvoir mesurer et valider les sons. Appuyez sur **Autoriser**

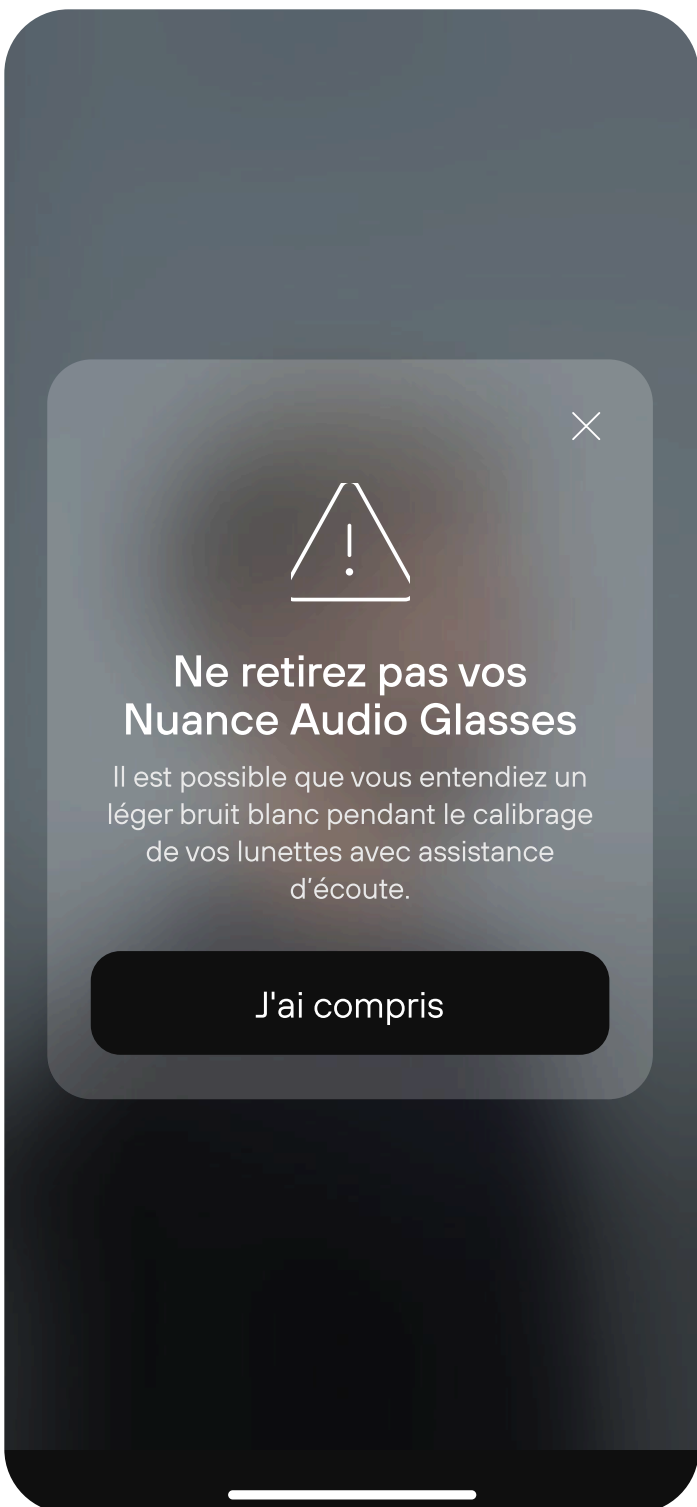


Un message contextuel vous rappellera de **Ne retirez pas vos lunettes Nuance Audio** pendant toute la durée du processus.




Calibrage personnel

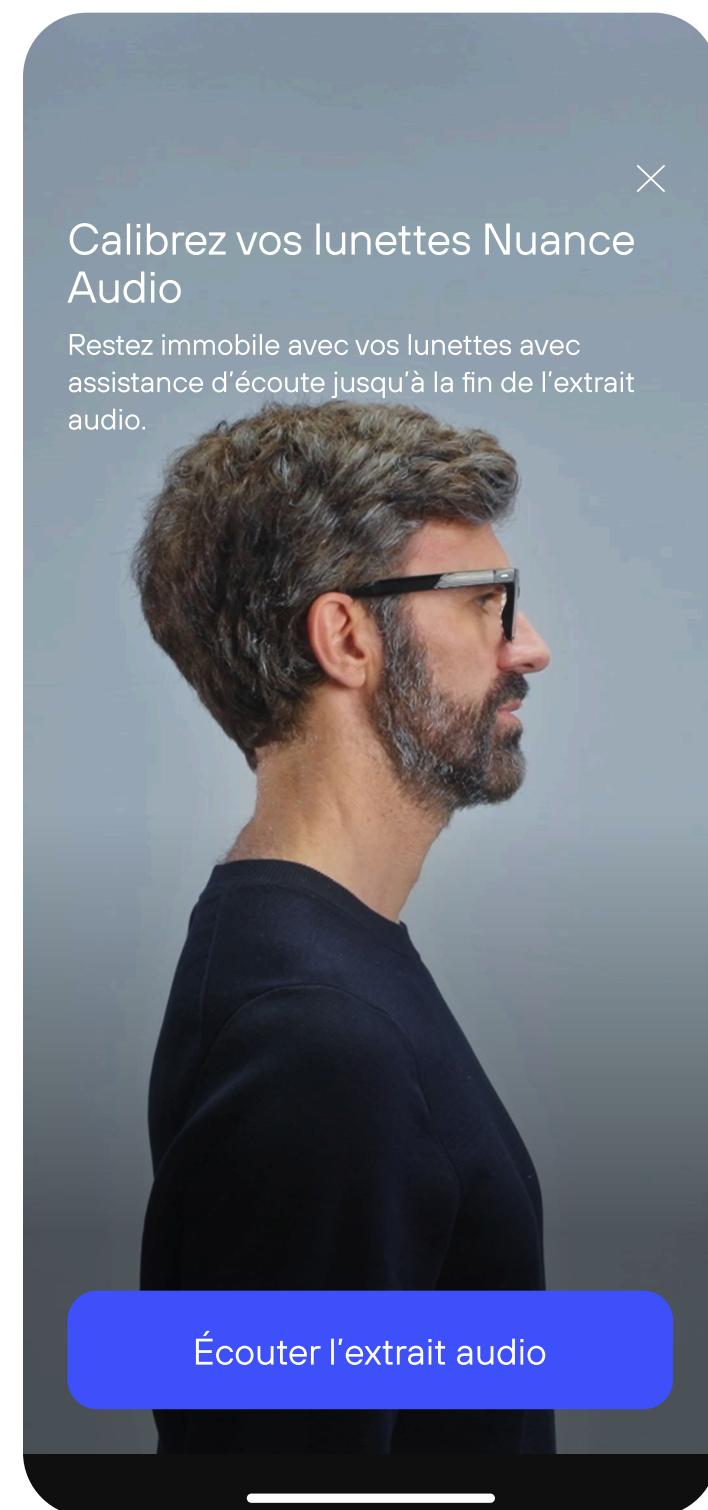

Étape 1.1
Mesure du bruit de fond.
Gardez vos lunettes et appuyez sur **Écouter l'extrait audio.**

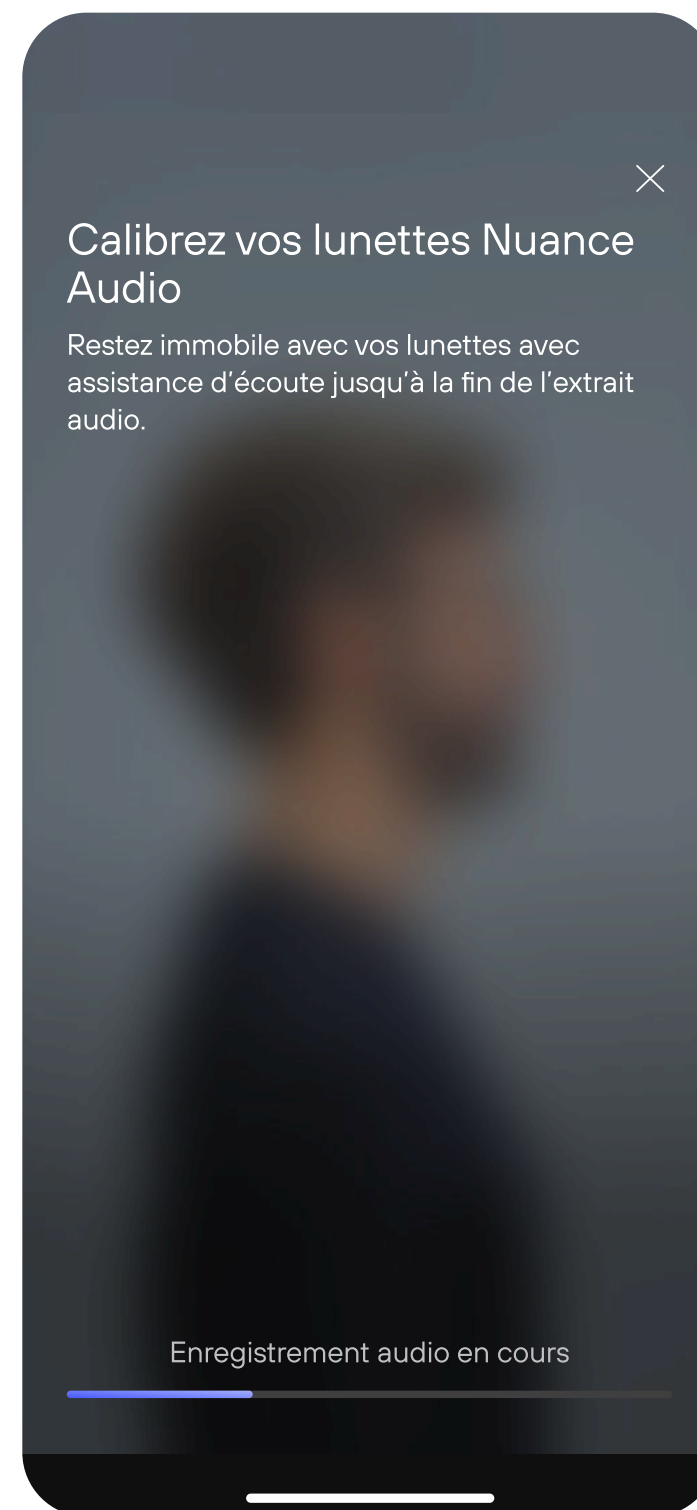


Étape 1.2
Restez immobile et n'enlevez pas vos lunettes; **attendez la fin de l'extrait audio.**

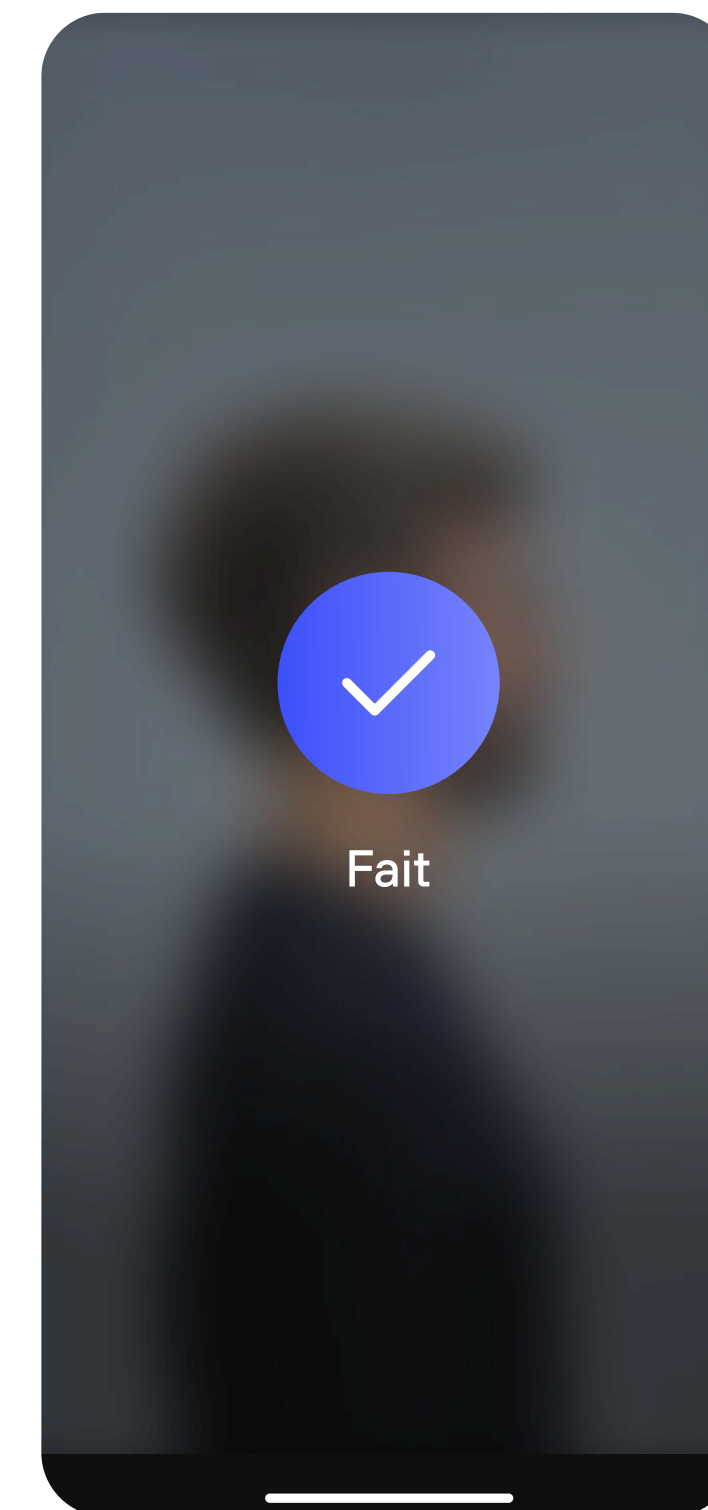


Étape 1.3
Mesure du bruit de fond terminée.




Calibrage vocal

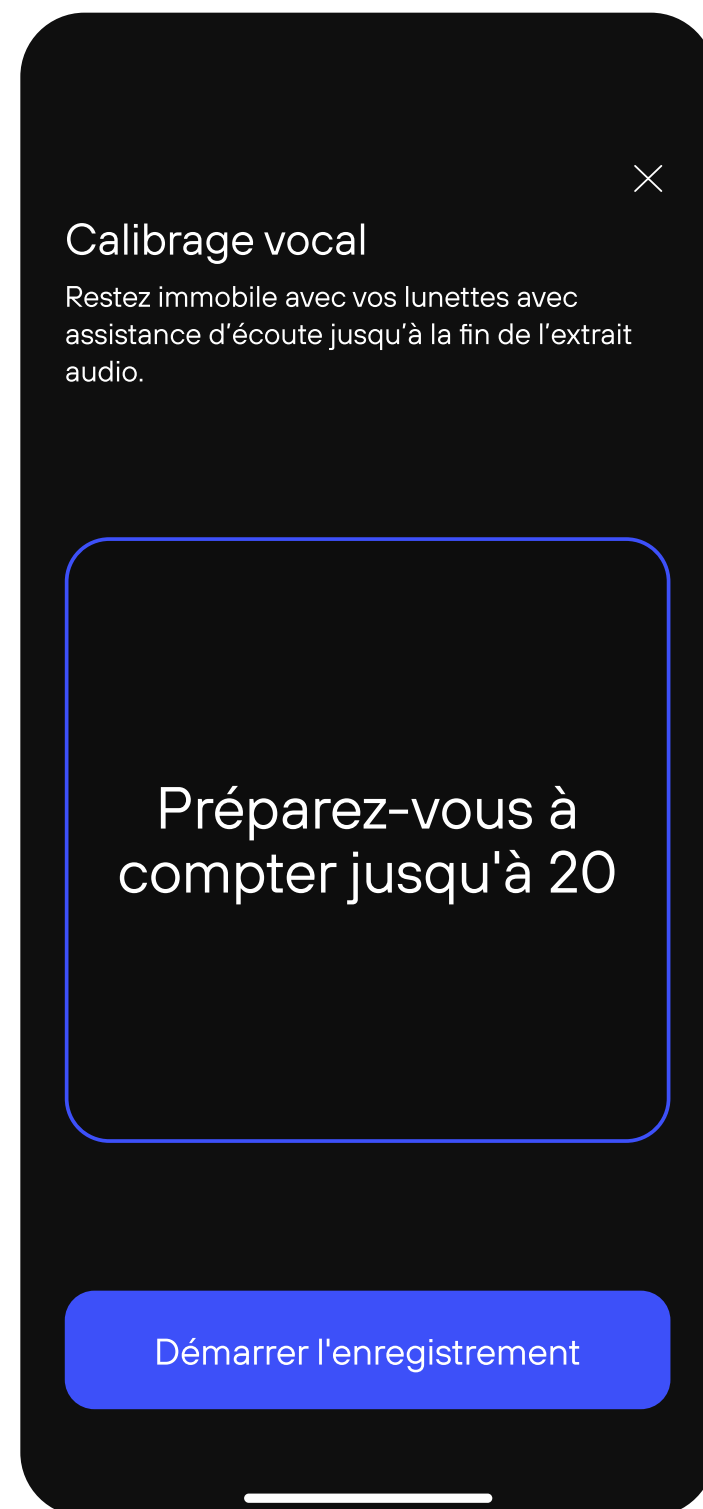

Étape 2.1
Calibrage de votre propre voix.
Restez immobile et n'enlevez pas vos lunettes
Appuyez sur **Lancer l'enregistrement**

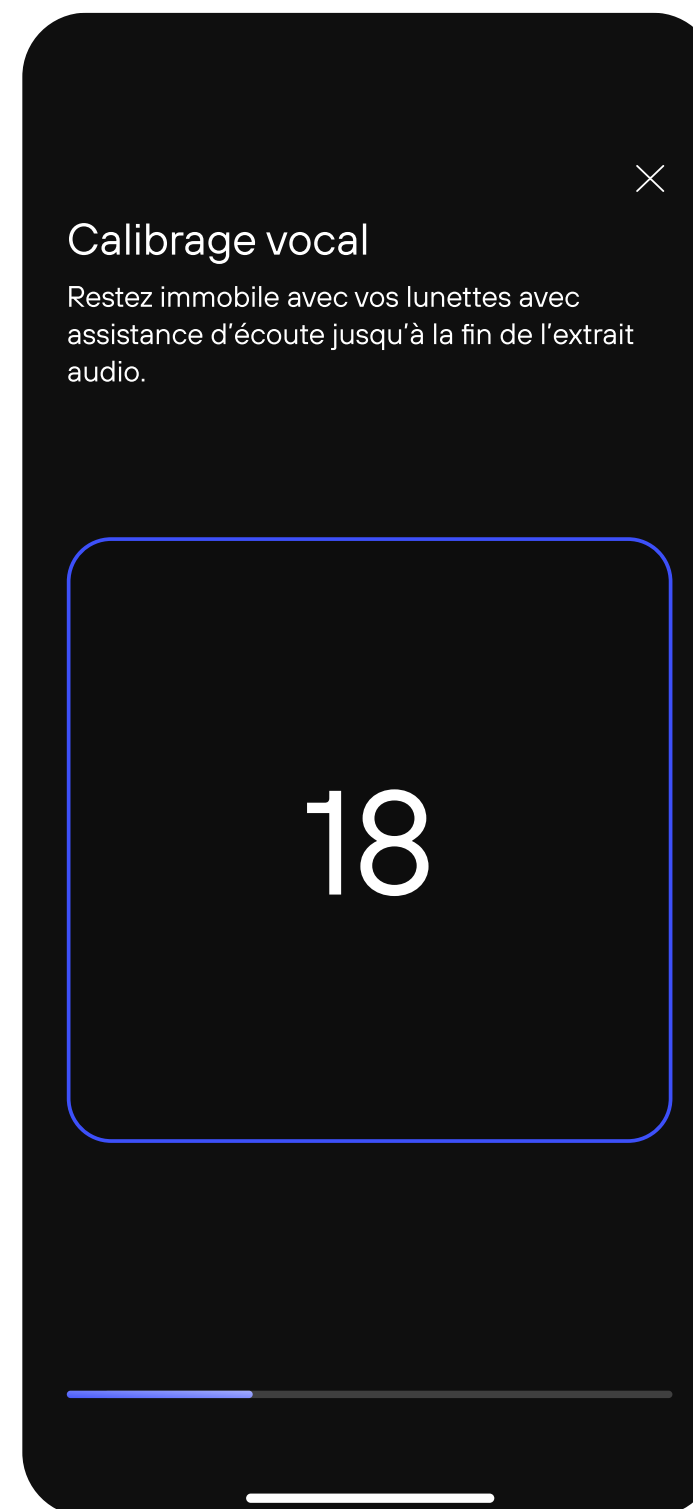

Étape 2.2
Comptez à voix haute jusqu'à ce que la barre de progression atteigne la fin.

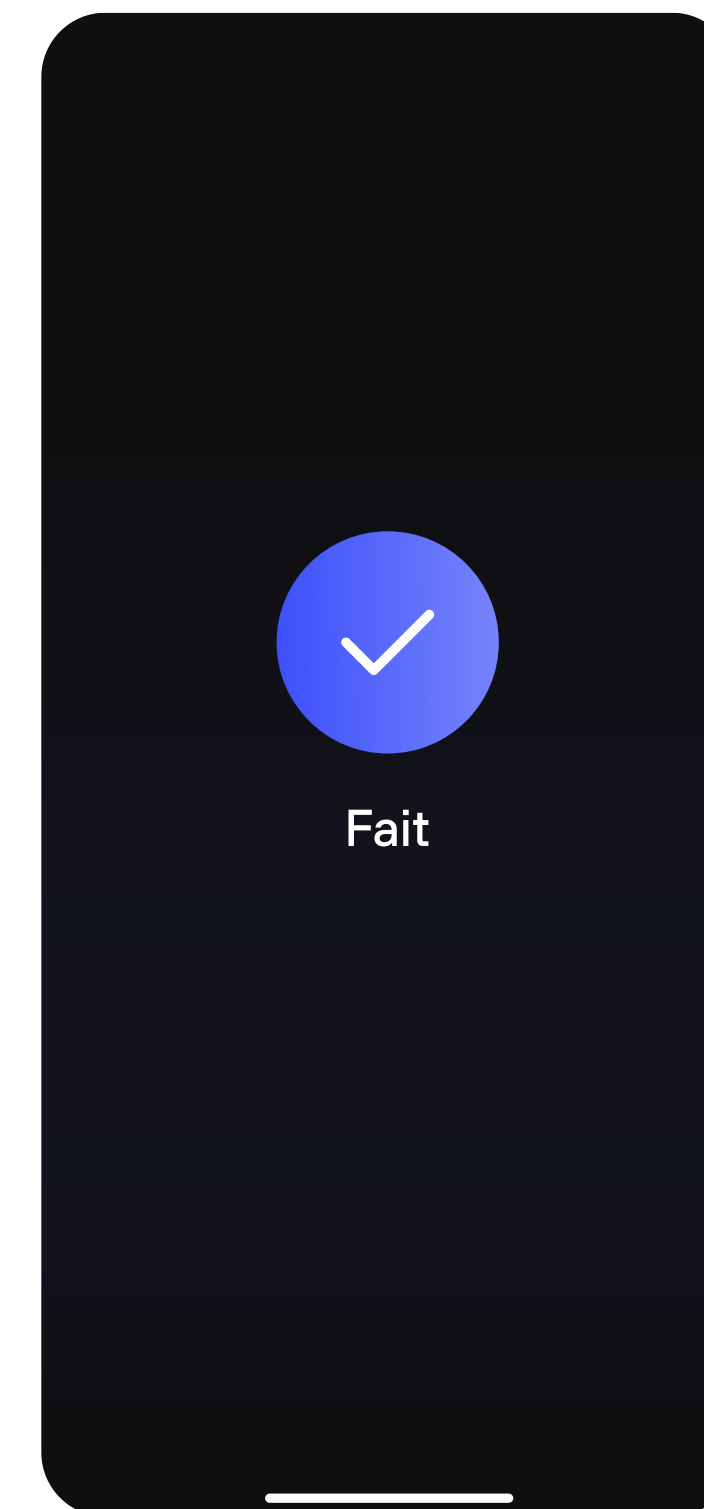

Étape 2.2
Calibrage personnel terminé avec succès.



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)