

Configurations : Préréglages audio



Description des préréglages

Nuance Audio propose **4 préréglages désignés pour vous aider à trouver la configuration la plus adaptée à vos préférences d'écoute.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification prédéfinis qui ont été conçus pour optimiser votre expérience d'écoute quand vous portez vos lunettes Nuance Audio. Chaque préréglage répond à des besoins d'amplification différents en ajustant diverses fréquences.

Commencez par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.
Ensuite, rendez-vous à la page d'accueil de votre application Nuance Audio et basculez entre les 4 préréglages : A, B, C et D.

N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier vos paramètres et les adapter à votre vie quotidienne, selon vos besoins et votre environnement.

Préréglage A

Pour une personne qui suit généralement bien les conversations dans les situations quotidiennes, mais qui pourrait bénéficier d'une légère amplification afin de mieux saisir certains mots ou détails, surtout quand l'environnement est loin d'être idéal.

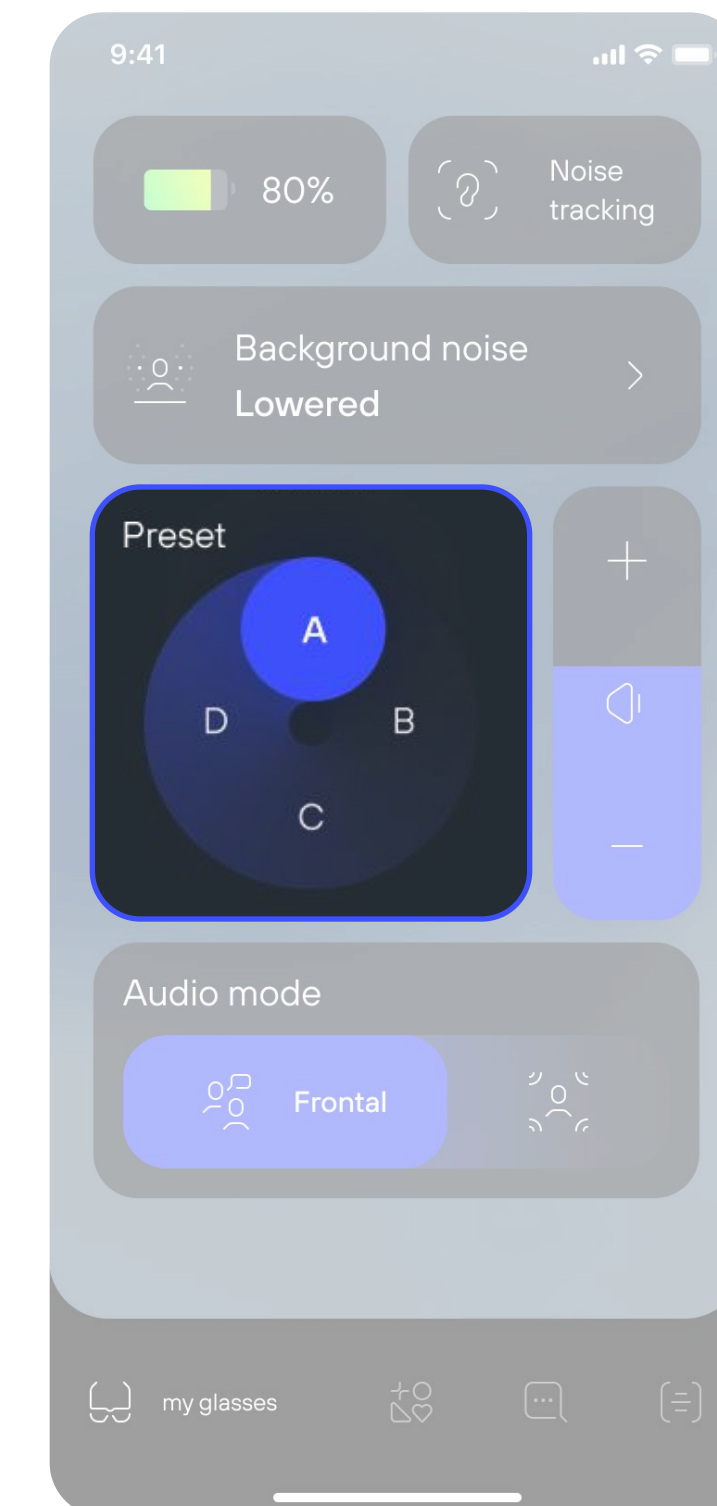



Description des préréglages

Nuance Audio propose **4 préréglages désignés pour vous aider à trouver la configuration la plus adaptée à vos préférences d'écoute.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification prédéfinis qui ont été conçus pour optimiser votre expérience d'écoute quand vous portez vos lunettes Nuance Audio. Chaque préréglage répond à des besoins d'amplification différents en ajustant diverses fréquences.

Commencez par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse. Ensuite, rendez-vous à la page d'accueil de votre application Nuance Audio et basculez entre les 4 préréglages : A, B, C et D.

N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier vos paramètres et les adapter à votre vie quotidienne, selon vos besoins et votre environnement.

Préréglage B

Pour une personne qui suit les conversations sans gêne dans les situations calmes et en tête-à-tête, mais qui peut avoir plus de difficulté à saisir tout ce qui est dit dans les environnements plus bruyants ou lorsque plusieurs personnes parlent, et qui peut bénéficier d'une légère amplification dans ces moments-là.

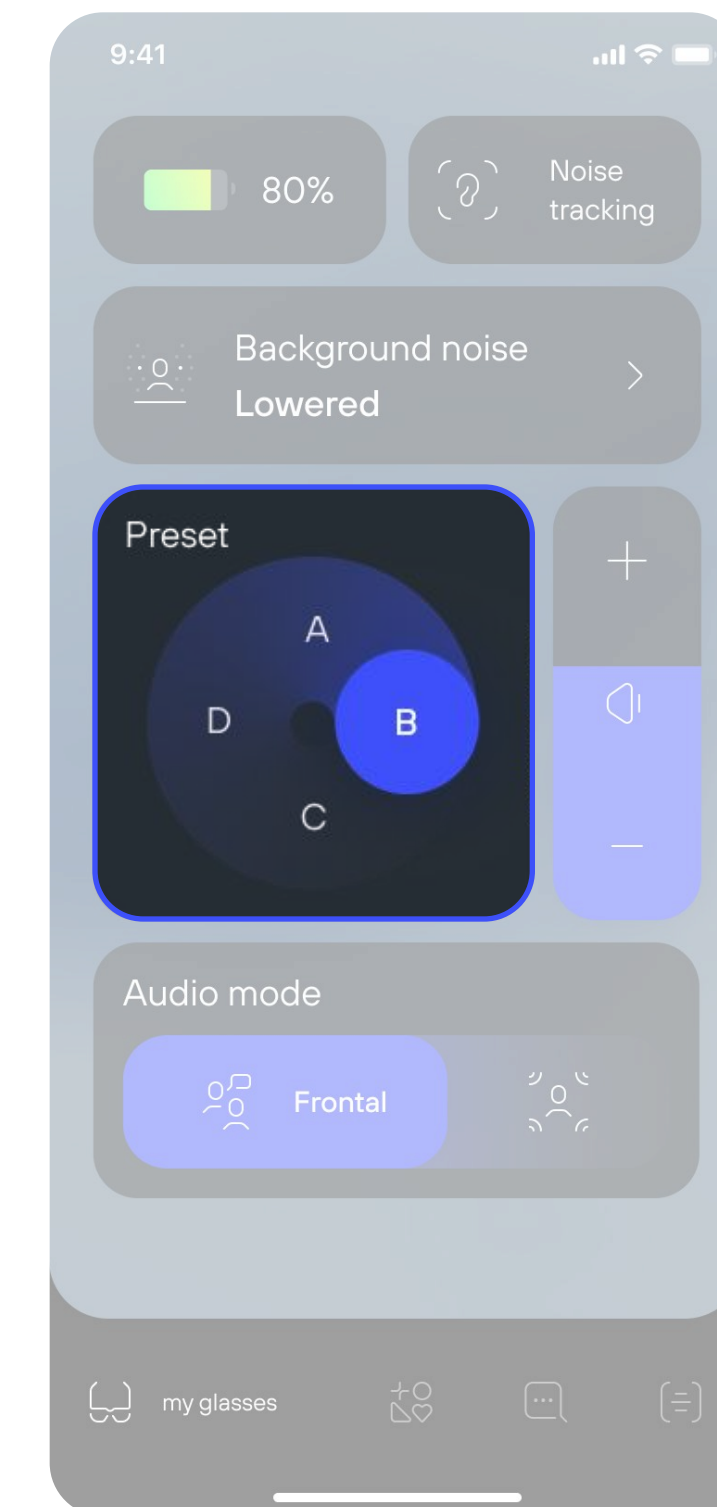



Description des préréglages

Nuance Audio propose **4 préréglages désignés pour vous aider à trouver la configuration la plus adaptée à vos préférences d'écoute.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification prédéfinis qui ont été conçus pour optimiser votre expérience d'écoute quand vous portez vos lunettes Nuance Audio. Chaque préréglage répond à des besoins d'amplification différents en ajustant diverses fréquences.

Commencez par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.
Ensuite, rendez-vous à la page d'accueil de votre application Nuance Audio et basculez entre les 4 préréglages : A, B, C et D.

N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier vos paramètres et les adapter à votre vie quotidienne, selon vos besoins et votre environnement.

Préréglage C

Pour une personne qui suit les conversations, mais qui peut parfois manquer certains mots ou détails dans des situations animées ou lorsque les échanges sont rapides, et qui apprécierait un soutien supplémentaire pour rester connectée dans ces moments.

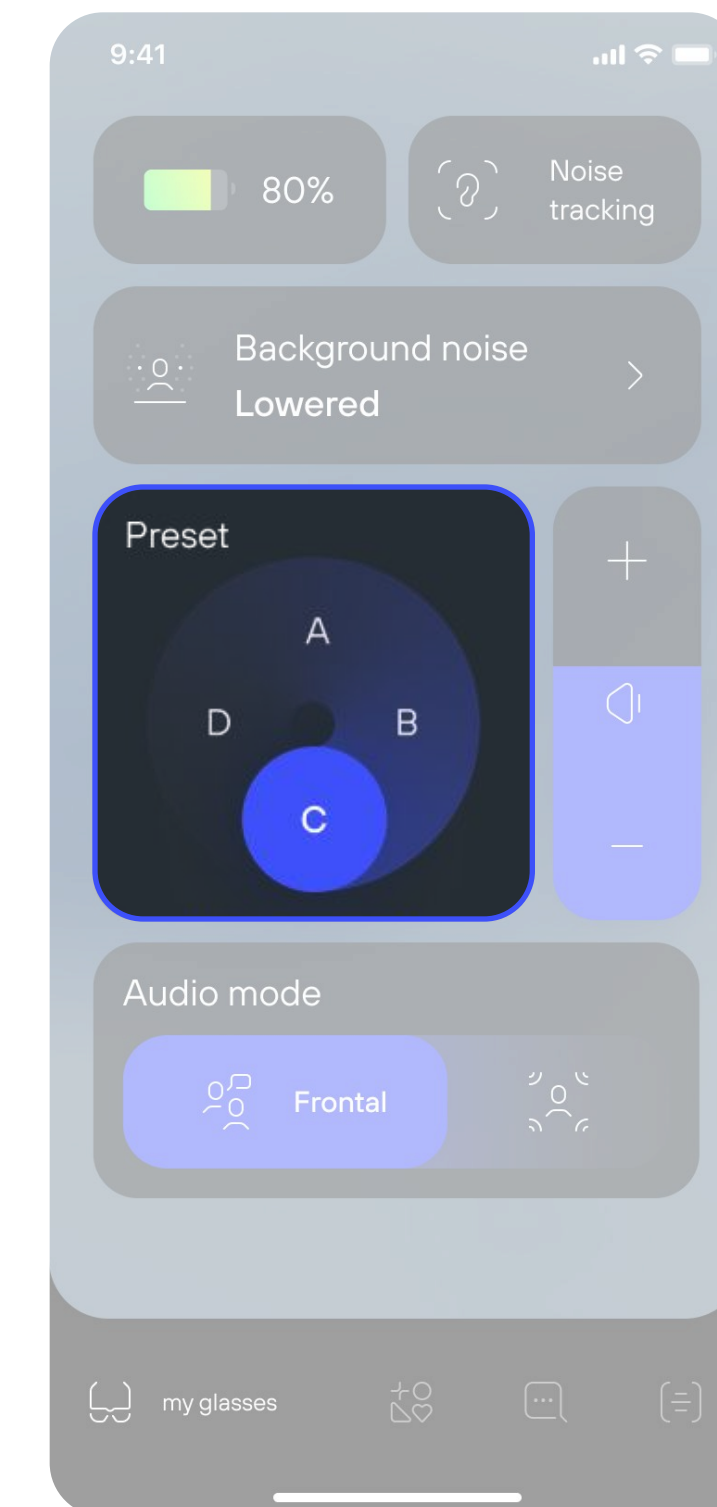



Description des préréglages

Nuance Audio propose **4 préréglages désignés pour vous aider à trouver la configuration la plus adaptée à vos préférences d'écoute.**


Les préréglages sont des paramètres d'amplification prédéfinis qui ont été conçus pour optimiser votre expérience d'écoute quand vous portez vos lunettes Nuance Audio. Chaque préréglage répond à des besoins d'amplification différents en ajustant diverses fréquences.

Commencez par calibrer vos lunettes dans une pièce silencieuse.
Ensuite, rendez-vous à la page d'accueil de votre application Nuance Audio et basculez entre les 4 préréglages : A, B, C et D.

N'oubliez pas que vous pouvez toujours modifier vos paramètres et les adapter à votre vie quotidienne, selon vos besoins et votre environnement.

Préréglage D

Pour une personne qui trouve les conversations moins claires, même dans des environnements calmes, et qui pourrait bénéficier d'une amplification légère pour mieux suivre les détails d'une conversation.

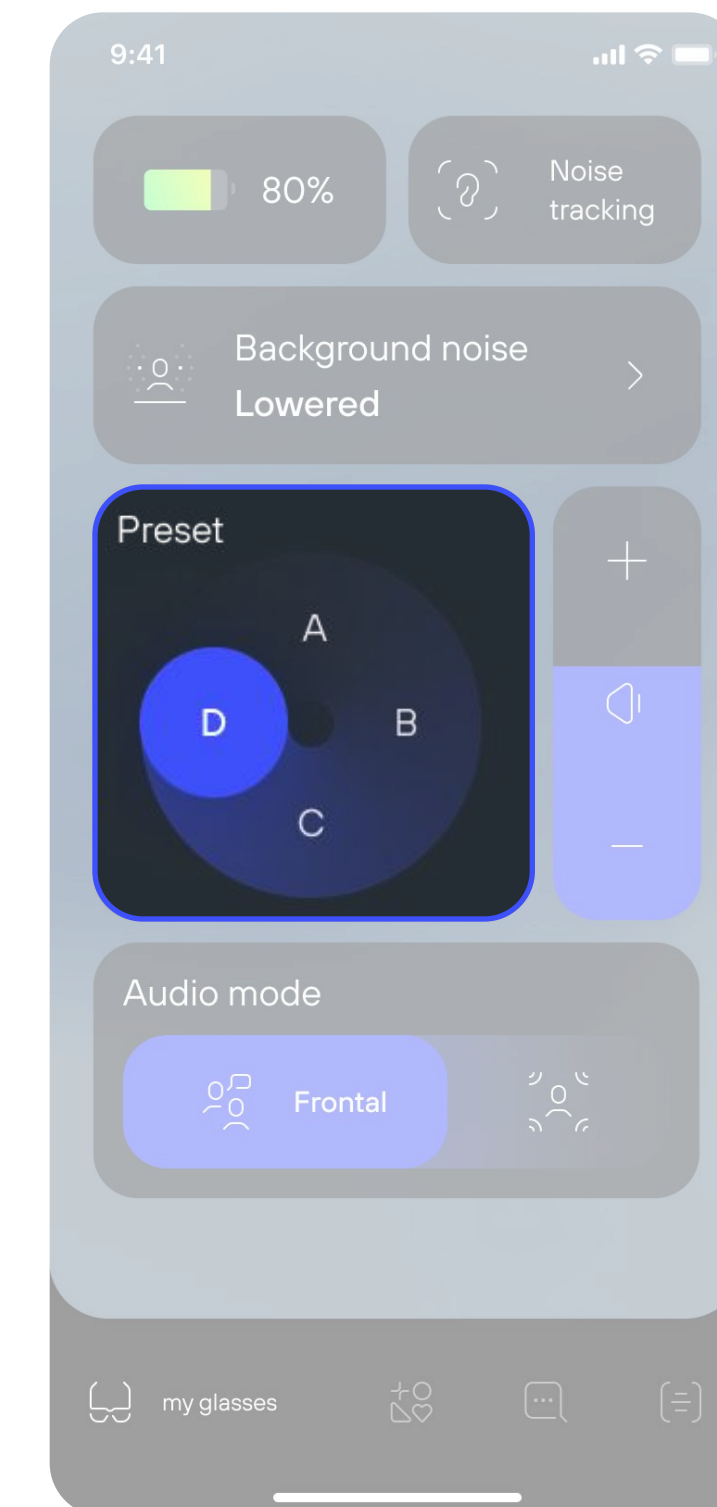



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)