


Configurations : Propre voix



Comment calibrer votre propre voix?


Nuance Audio vous permet de calibrer votre propre voix afin que vous puissiez décider du niveau de clarté de celle-ci pour un confort optimal.

Comment calibrer votre propre voix?

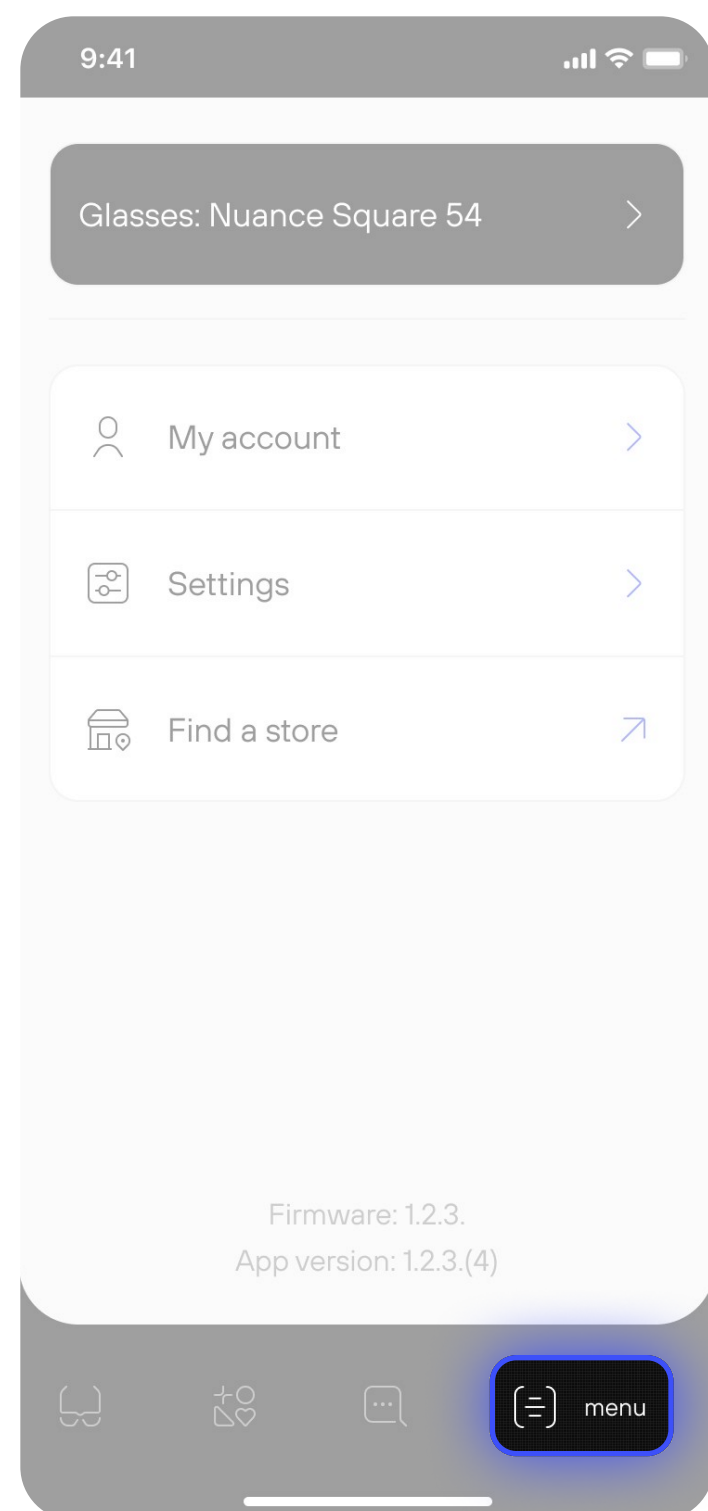


Dans le tableau de bord de l'application Nuance Audio, appuyez sur **Menu** (coin inférieur droit de la barre de navigation).

Dans le menu, touchez **Paramètres**

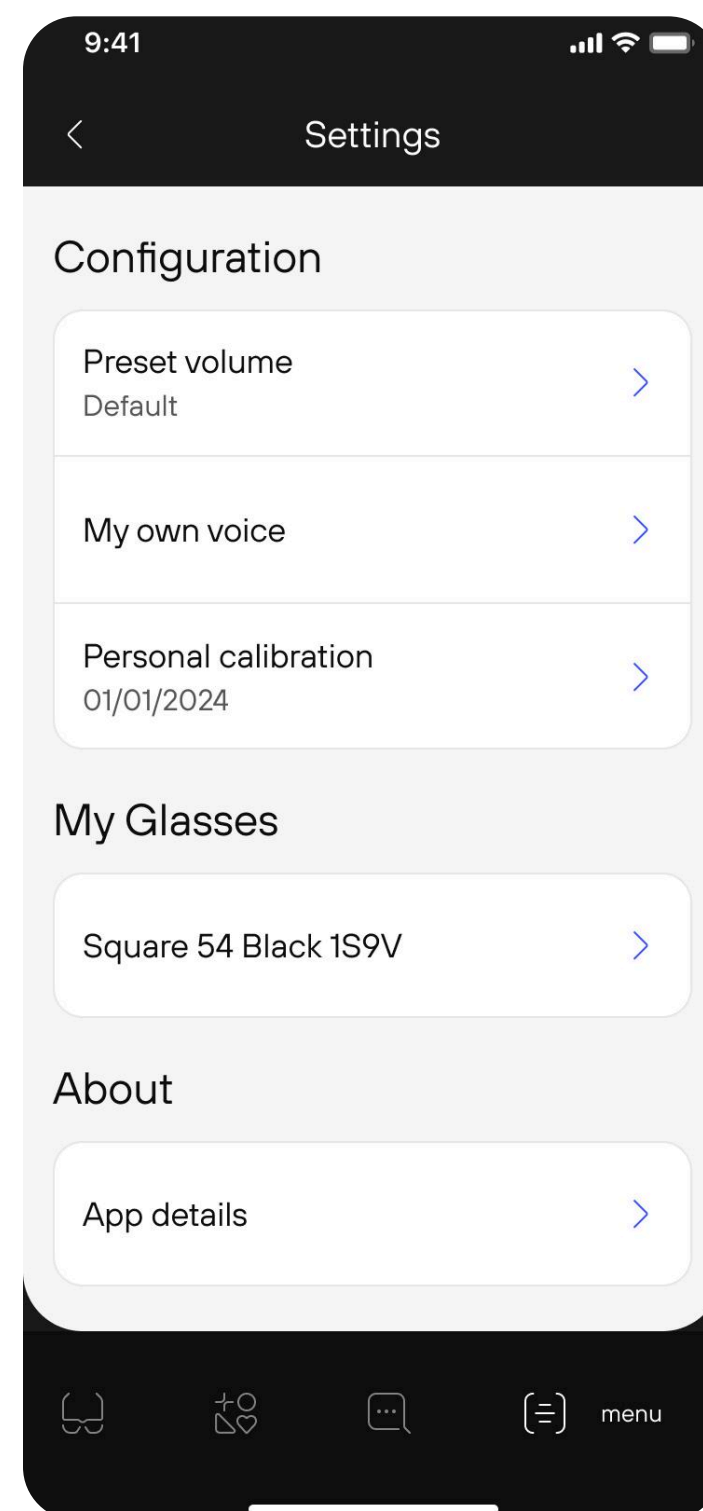

Dans les paramètres, sélectionnez **Ma propre voix**

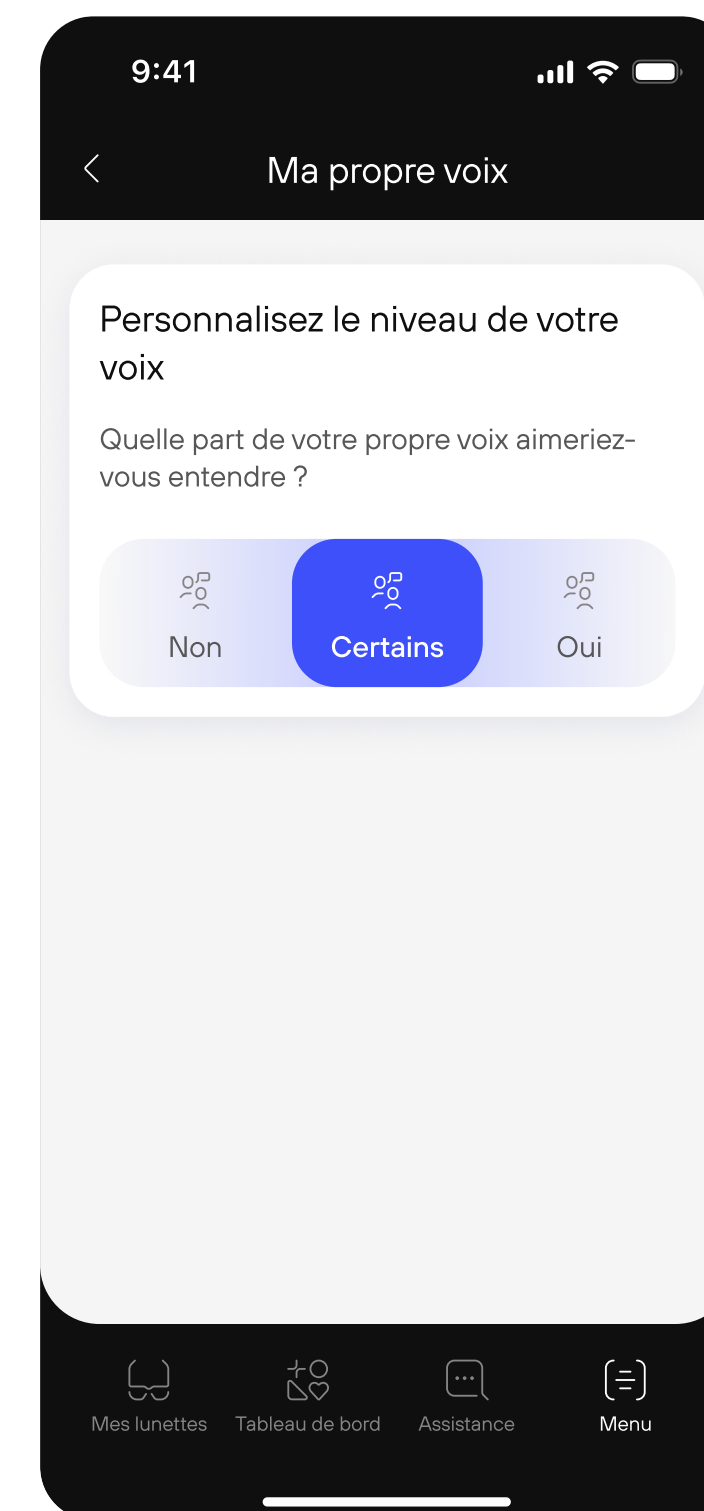

Vous pouvez maintenant **ajuster librement vos niveaux d'amplification** en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Remarques

Veillez noter que le réglage du **calibrage personnel est également important** pour optimiser votre expérience globale, en garantissant un son naturel et une clarté optimale pour votre voix, ainsi que pour d'autres paramètres audio.



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)