


Comment recharger



Prêt à recharger vos lunettes Nuance Audio?


Étape 1

Commencez par brancher la station de recharge fournie à un chargeur ou à une source d'alimentation USB-C (minimum 5 V) à l'aide du câble USB-C fourni.

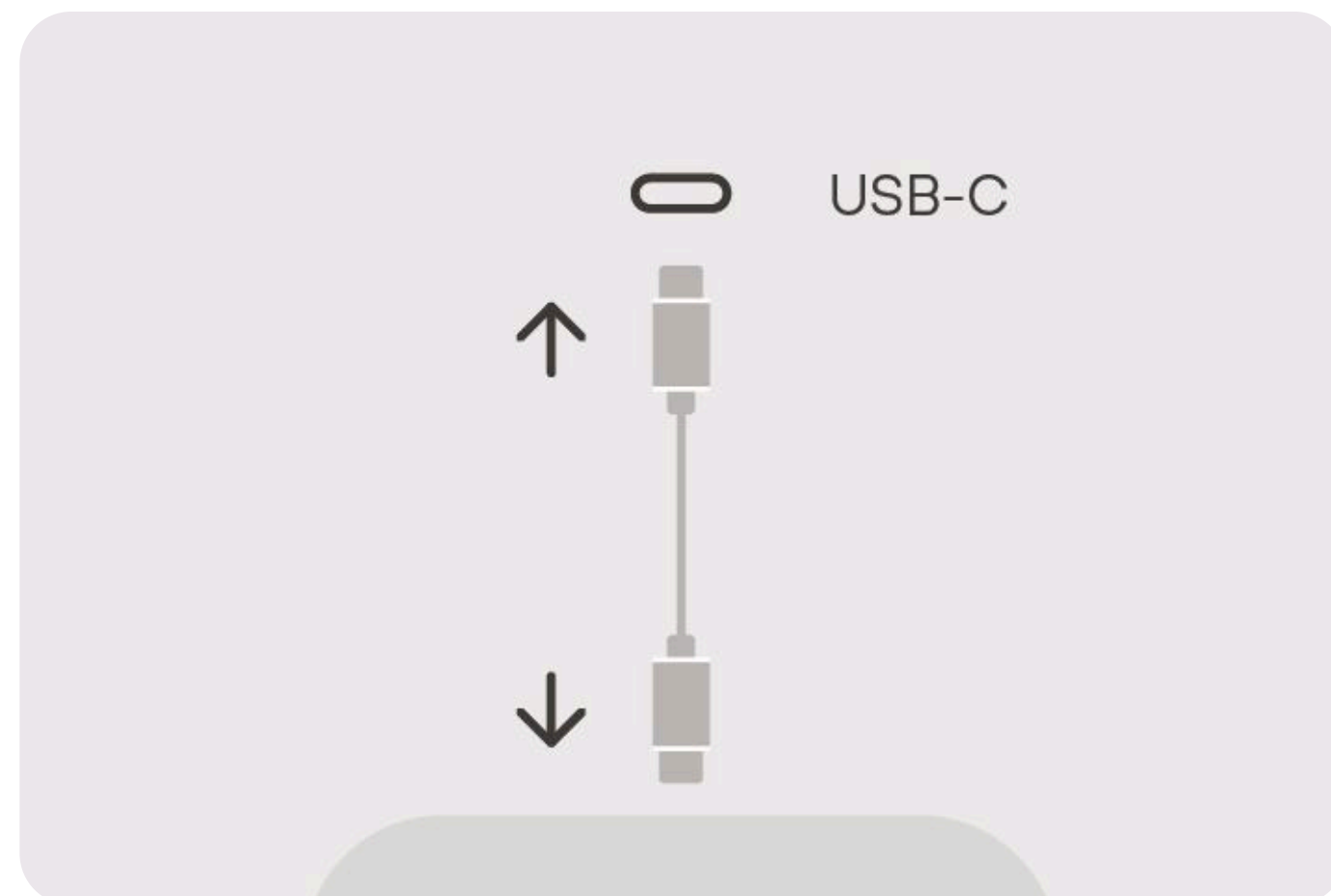

Étape 2

Ensuite, pliez vos lunettes Nuance Audio et placez-les directement sur la station de recharge, comme indiqué. Les aimants situés à l'intérieur de la station de recharge vous aideront à positionner correctement les lunettes.

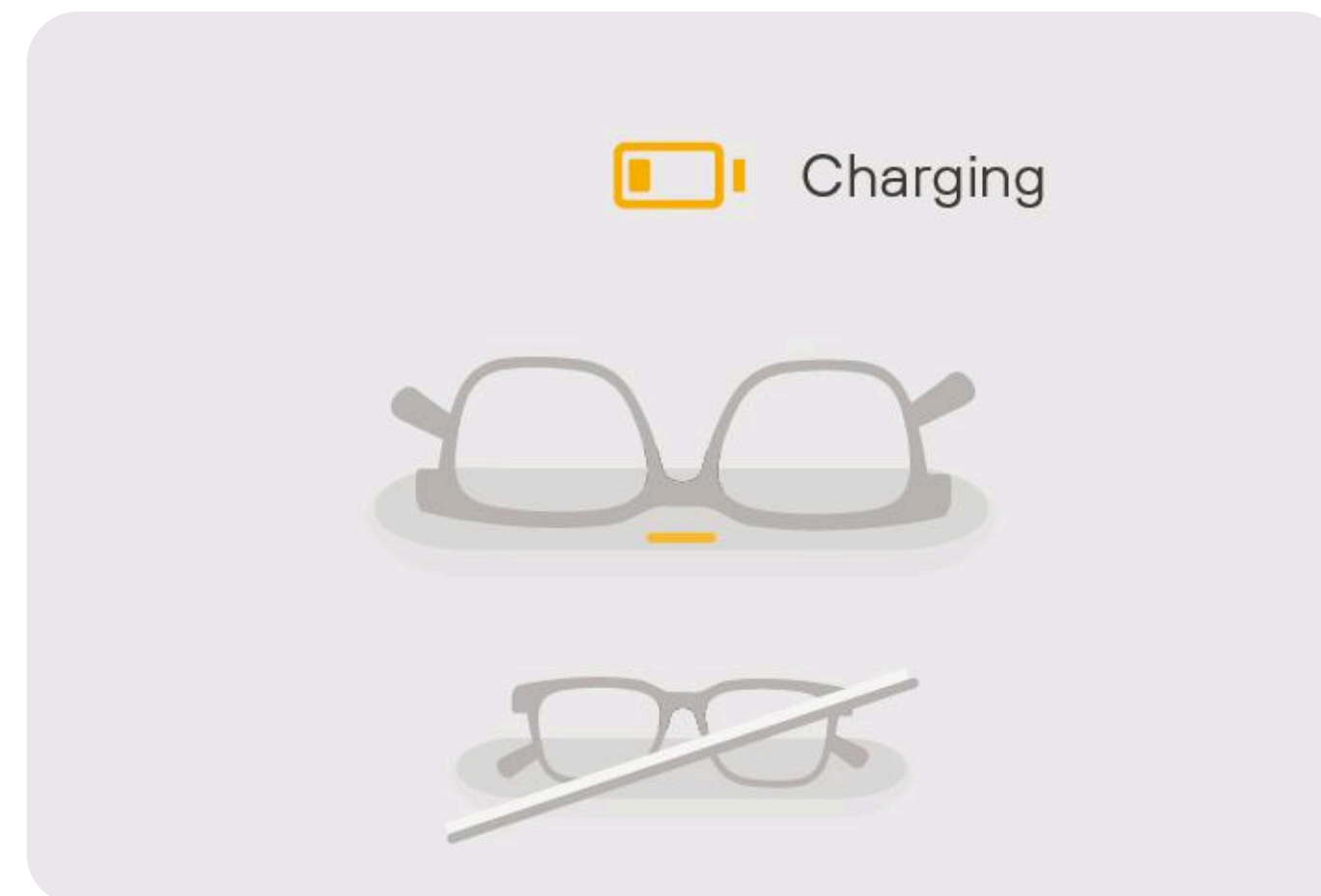




Comment savoir quand vos lunettes sont chargées?


Voyant orange

Charge en cours.

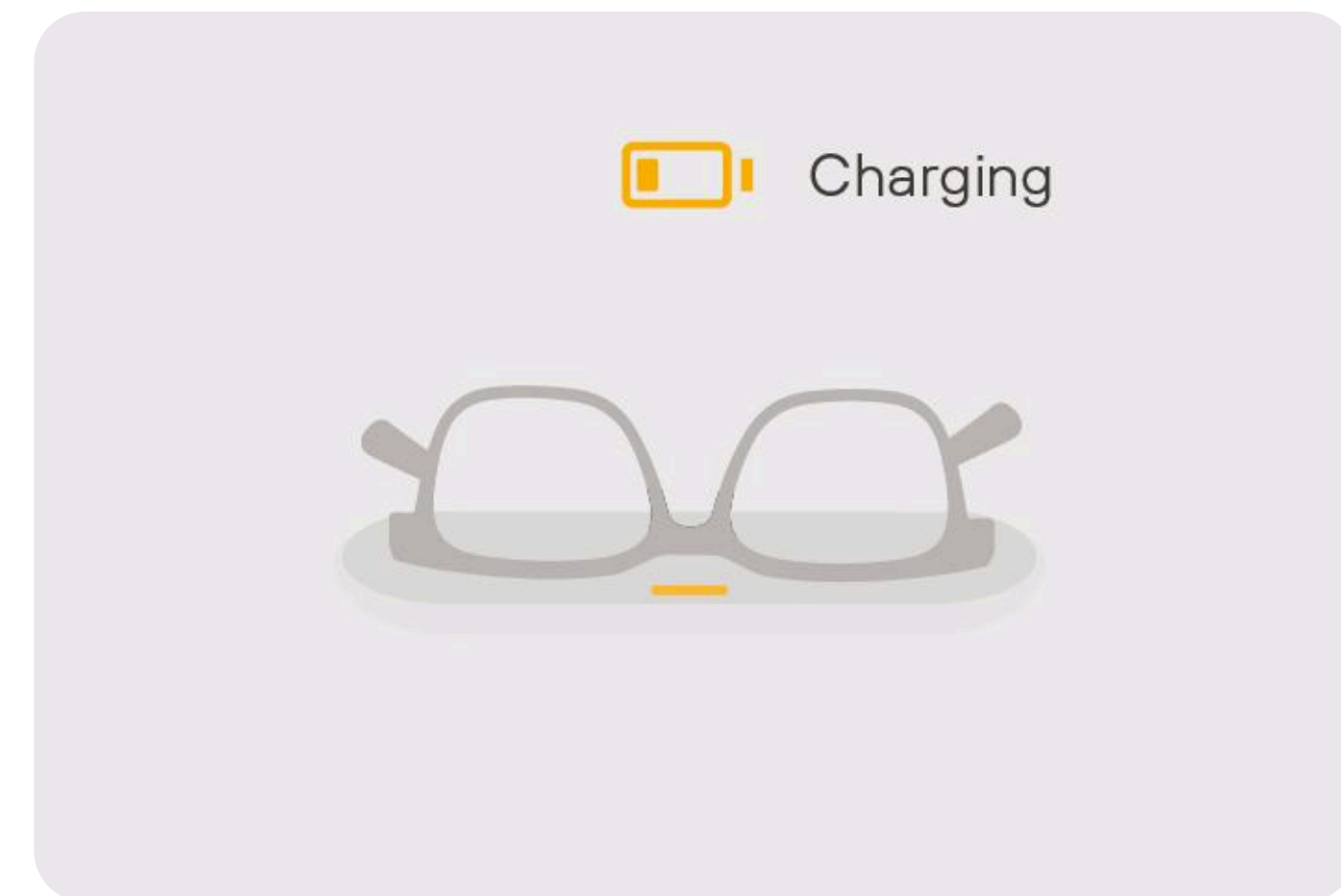

Voyant vert

Les lunettes sont complètement chargées (au moins 96 %).

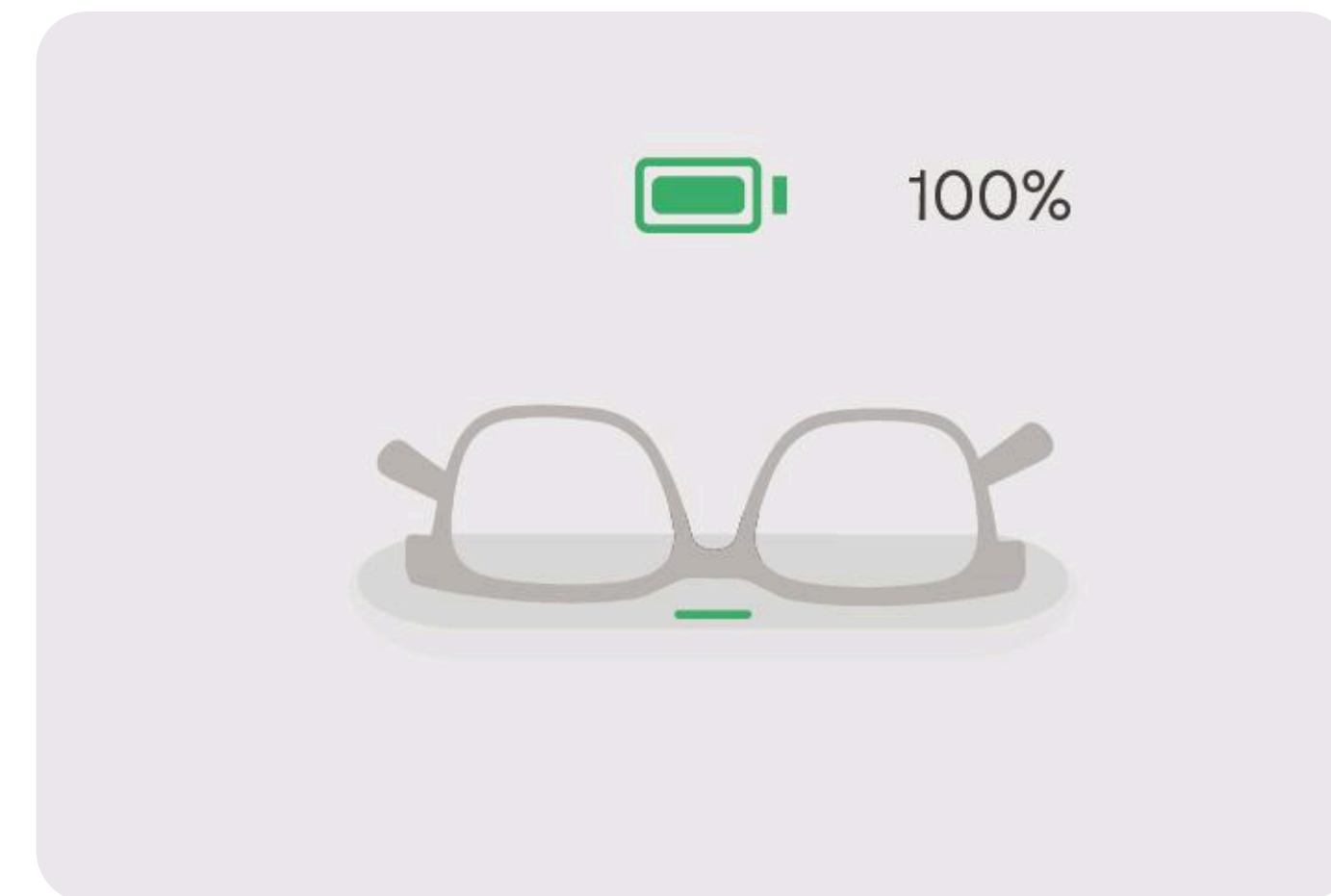




Indication du niveau de la batterie

Lorsque vous reprenez vos lunettes, le voyant de la station de recharge et celui de la monture indiquent le niveau de la batterie pendant quelques secondes.

Voyant rouge

Niveau de la batterie inférieur à 20 %.

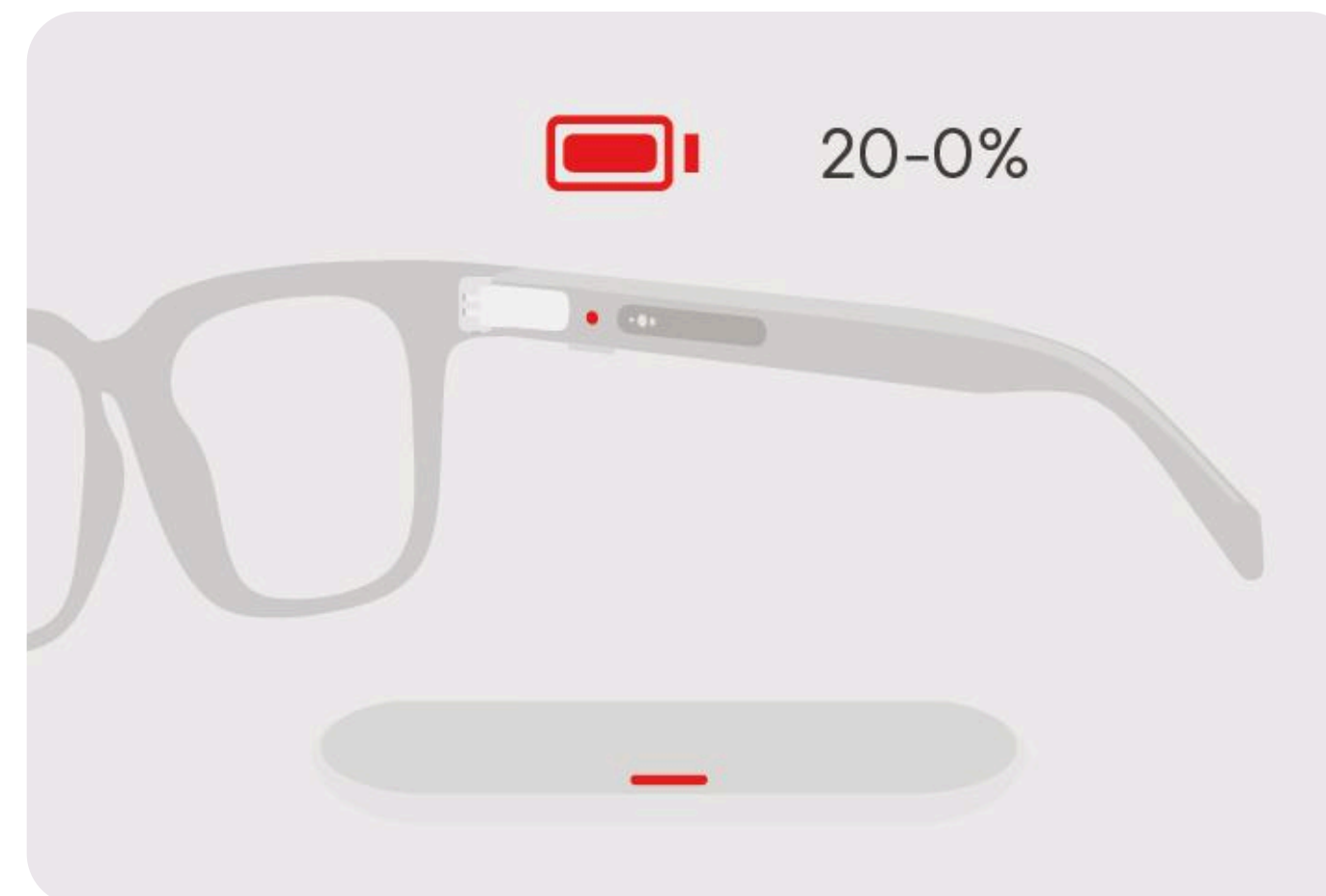

Voyant vert

Niveau de la batterie supérieur à 20 %.





Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)