

Conseils d'entretien



Les lunettes Nuance Audio sont-elles étanches à l'eau?

Les lunettes Nuance Audio sont conçues pour être conformes à l'indice de protection IPX4, y compris au niveau des microphones. Cet indice protège contre les éclaboussures d'eau, ce qui rend les lunettes adaptées aux entraînements ou à une pluie légère. Bien qu'elles ne soient pas conçues pour être immergées, elles offrent une protection contre les éclaboussures mineures.





La transpiration, le maquillage et autres produits chimiques courants peuvent-ils endommager mes lunettes Nuance Audio?

Les lunettes Nuance Audio sont conçues pour résister aux produits chimiques courants comme le désinfectant pour les mains, les nettoyeurs, le savon pour les mains, le gel pour cheveux et la crème solaire.





Comment nettoyer les verres et la monture?

Nettoyage quotidien :

Utilisez une lingette nettoyante humide et du savon neutre (vaporisez le produit sur la lingette nettoyante, jamais directement sur les verres). Évitez tout type de vaporisateur, solvant, produit chimique ou solution de nettoyage contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque. Ne passez pas vos lunettes sous l'eau courante et n'utilisez aucun outil de nettoyage (comme une brosse pour appareil avec assistance d'écoute, un cure-dent ou de l'air comprimé).

Nettoyage en profondeur :

Pour nettoyer les verres, utilisez un nettoyant pour verres et vaporisez le produit sur la lingette nettoyante, jamais directement sur les verres. Nettoyez délicatement les parties extérieures des lunettes, y compris les 6 micros et les 4 haut-parleurs.

Protection :

Assurez-vous de ranger vos lunettes dans leur étui quand vous ne les utilisez pas.

En cas de contact avec de l'eau salée, de l'eau de piscine ou d'autres produits chimiques comme des cosmétiques, de la laque pour cheveux, de la crème solaire et des insectifuges, nous vous recommandons d'essuyer immédiatement vos lunettes avec un chiffon humide non abrasif.



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

↗ [Consultez les instructions d'utilisation](#)