

Mise à jour du micrologiciel



Préparation pour la mise à jour du micrologiciel

Le micrologiciel est un logiciel spécialisé intégré à vos lunettes qui en contrôle le fonctionnement.


Les mises à jour du micrologiciel améliorent les performances, ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou corrigent les bogues de l'appareil.

Pour que vos lunettes Nuance Audio fonctionnent de manière optimale et demeurent en bon état, il est important de mettre régulièrement à jour leur micrologiciel. **Voici comment faire :**

Vérifiez le niveau de batterie de vos lunettes Nuance Audio


Nuance Audio Glasses :

Assurez-vous que le niveau de batterie de vos lunettes soit supérieur à 20 %. Les mises à jour du micrologiciel ne peuvent pas s'exécuter si la batterie est

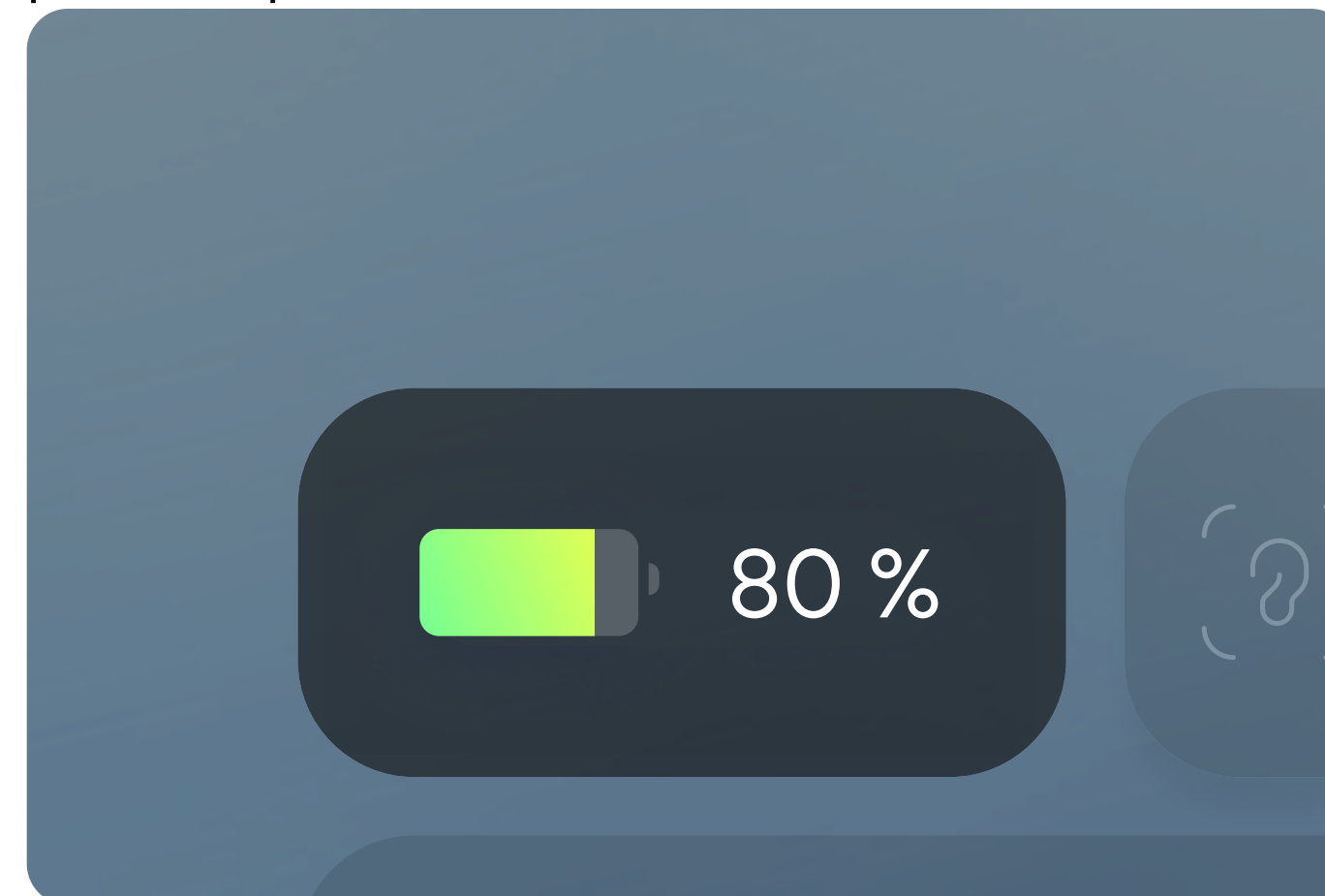

Vérifier la connexion de l'appareil :

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à un réseau Wi-Fi stable ou à un réseau de données mobiles pour recevoir les mises à jour potentielles.

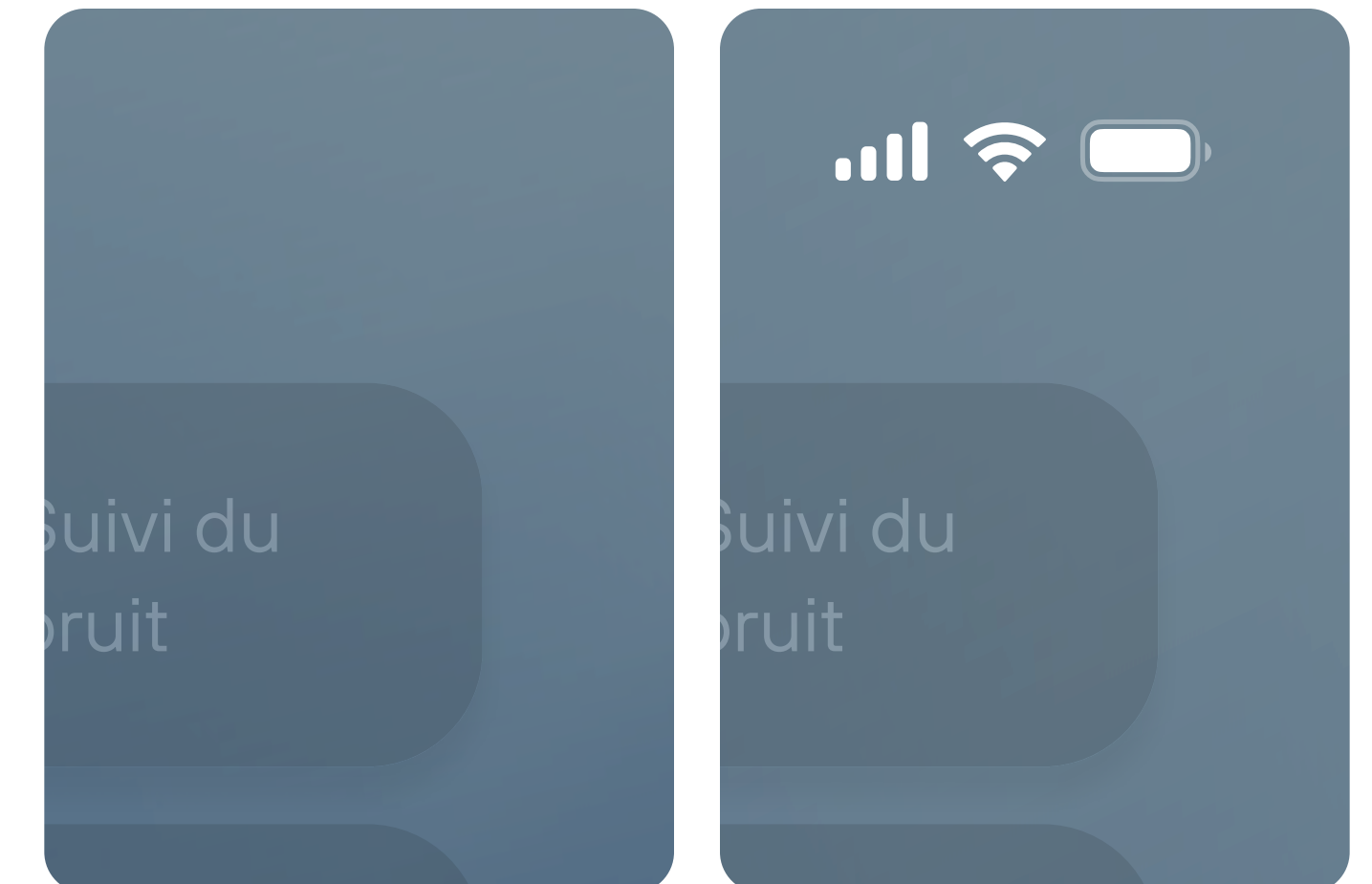


Connexion Wi-Fi activée
Appareil Android

Connexion Wi-Fi activée
Appareil Apple




Comment mettre à jour le micrologiciel

Une fois que vous avez vérifié les niveaux de batterie et la connexion de l'appareil, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel en suivant ces étapes ::

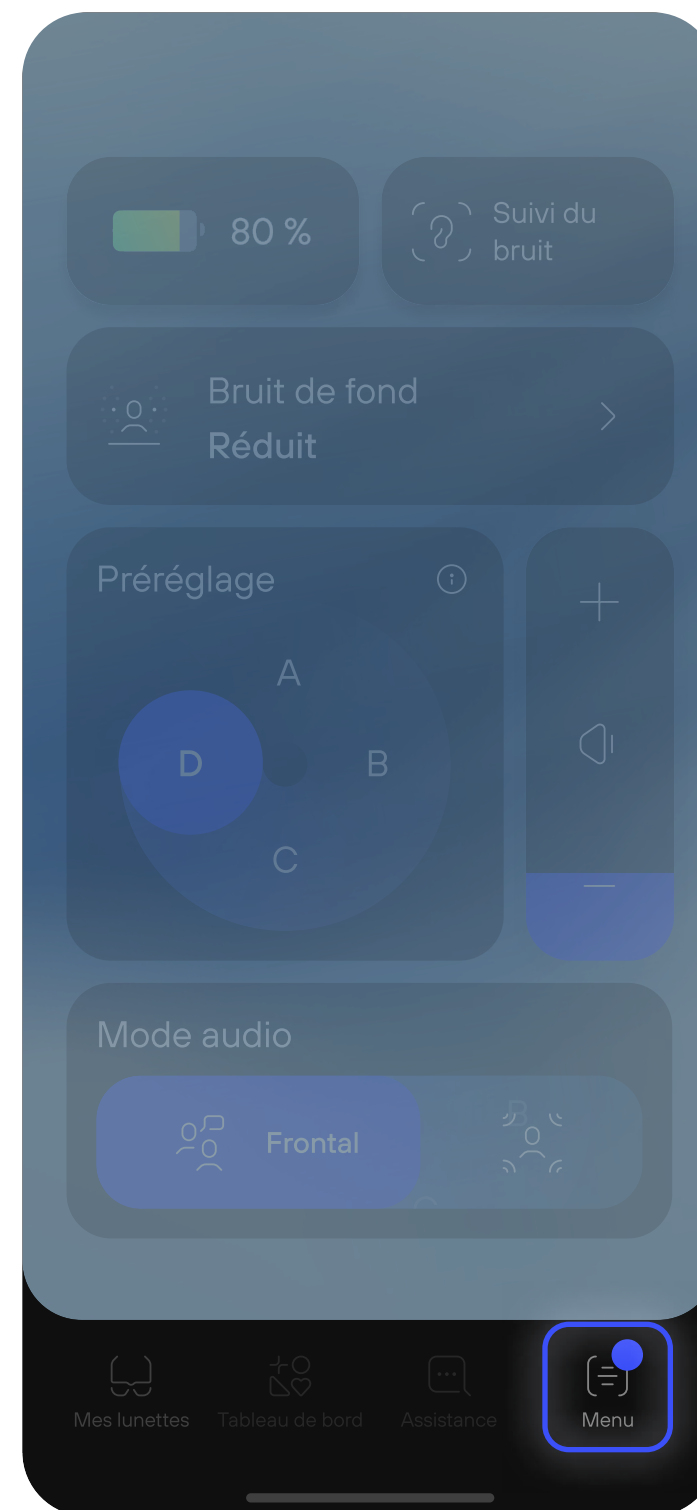

Étape 1
Ouvrez l'application Nuance Audio sur votre appareil mobile. Appuyez ensuite sur l'**icône Menu** située en bas à droite de la barre de navigation de la page d'accueil. Un point bleu vous indiquera que vous devez faire une mise à jour du micrologiciel.

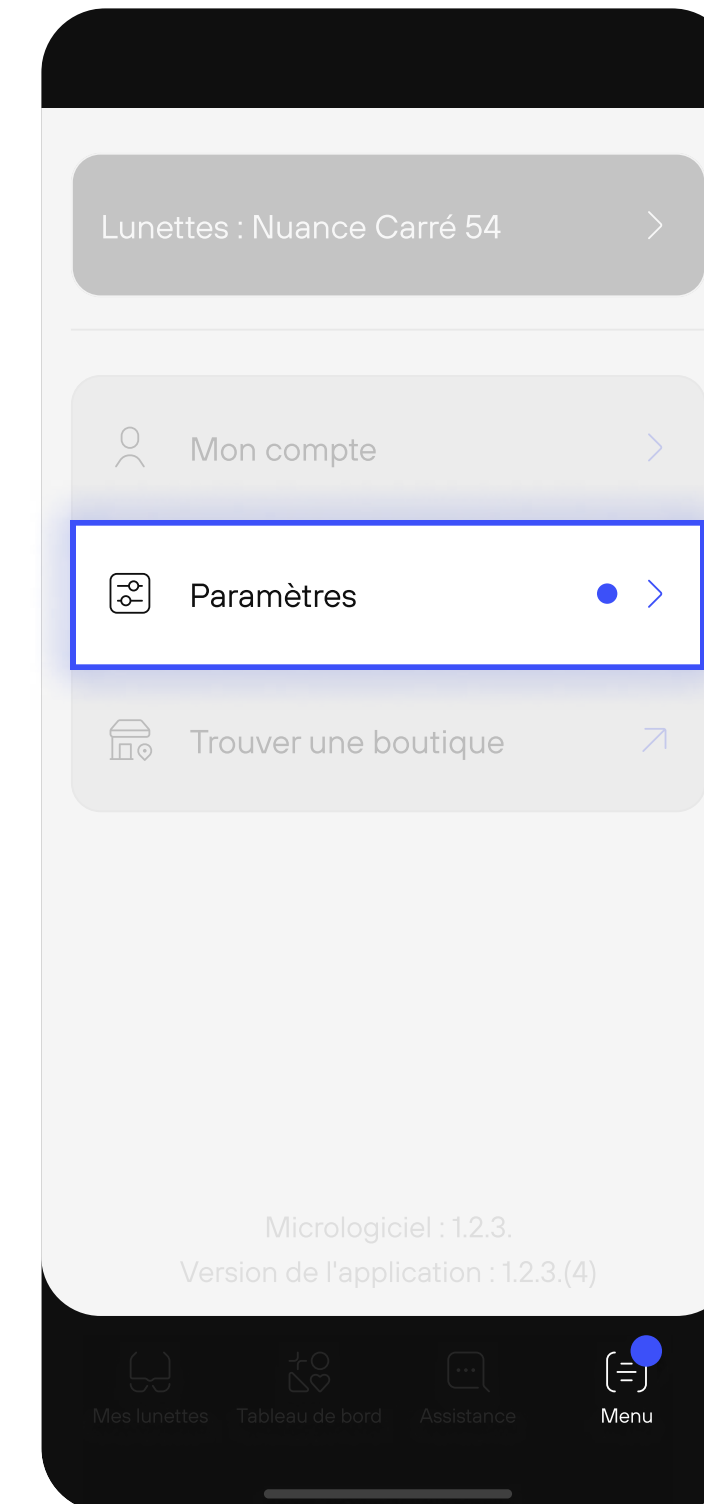

Étape 2
Touchez **Paramètres**.




Comment mettre à jour le micrologiciel




Étape 3
Touchez le nom des lunettes affiché juste en dessous

et vérifiez les mises à jour du micrologiciel.

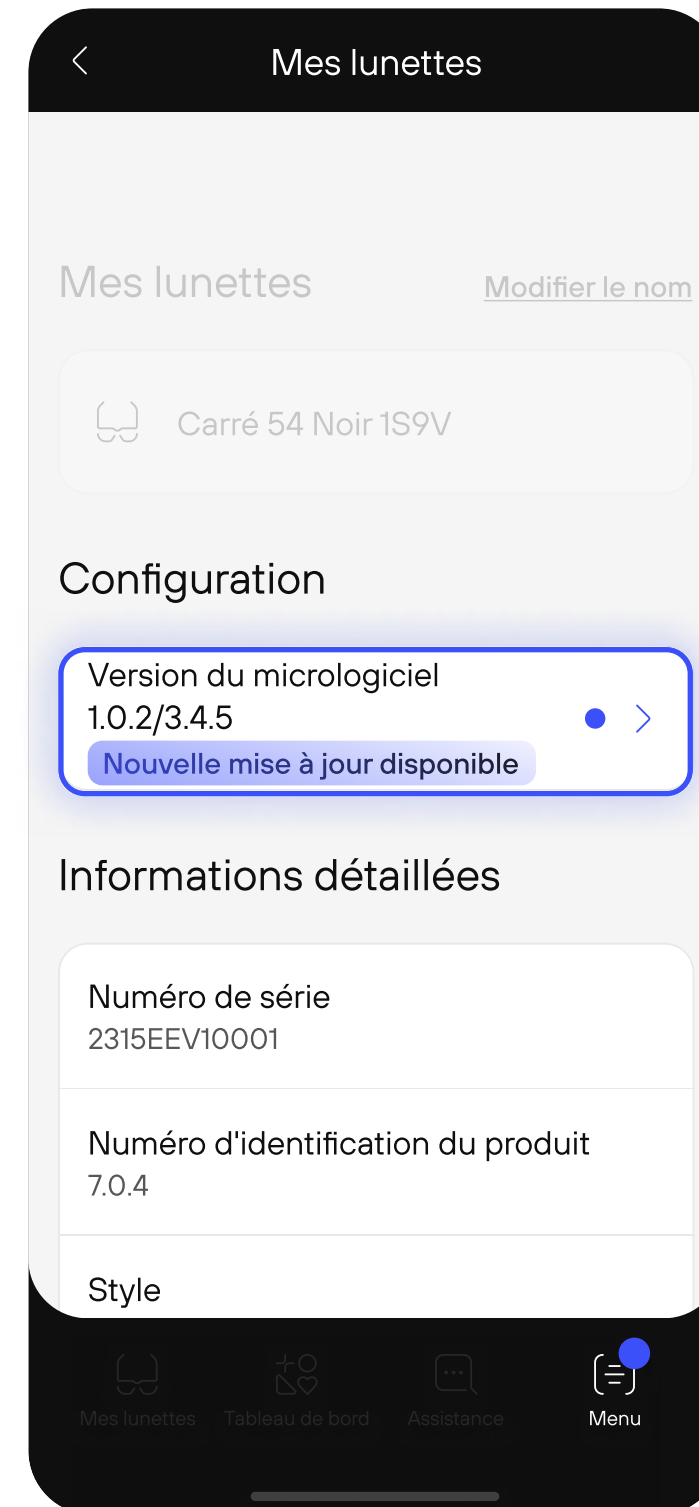

Étape 4
Dans la section Mes lunettes, vous pouvez consulter l'état actuel du micrologiciel et les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour du micrologiciel, **appuyez sur l'onglet Version du micrologiciel**

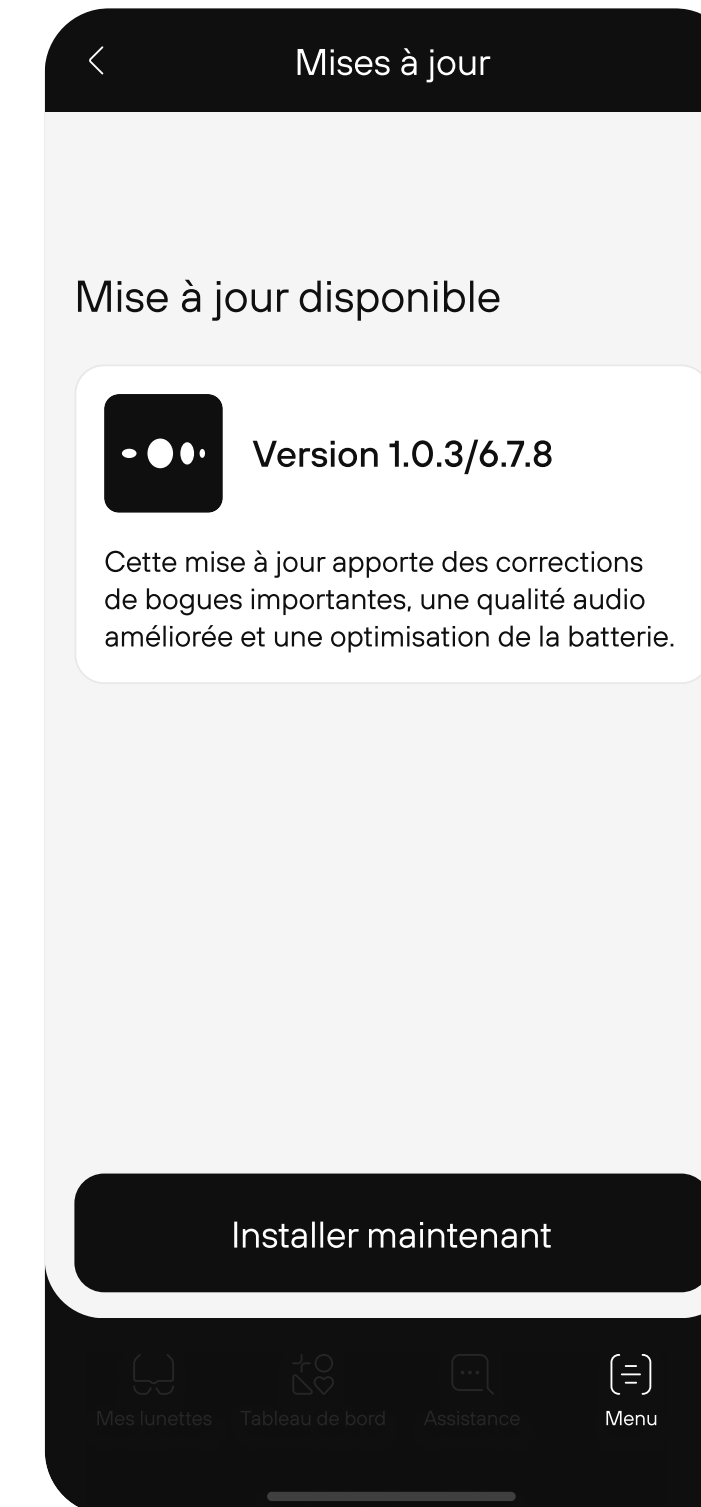

Étape 5
Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions données par l'application Nuance Audio pour mettre à jour le micrologiciel en toute sécurité.




Comment mettre à jour le micrologiciel

Étape 6

La mise à jour du micrologiciel sera **téléchargée sur l'application**, puis **installée sur vos lunettes Nuance Audio**.

Une fois l'opération terminée, vos lunettes redémarreront automatiquement et vous reviendrez à la section Mes lunettes.

Si vous éprouvez des difficultés lors de la mise à jour, vous pouvez communiquer avec notre [Centre d'assistance](#) pour obtenir de l'aide.

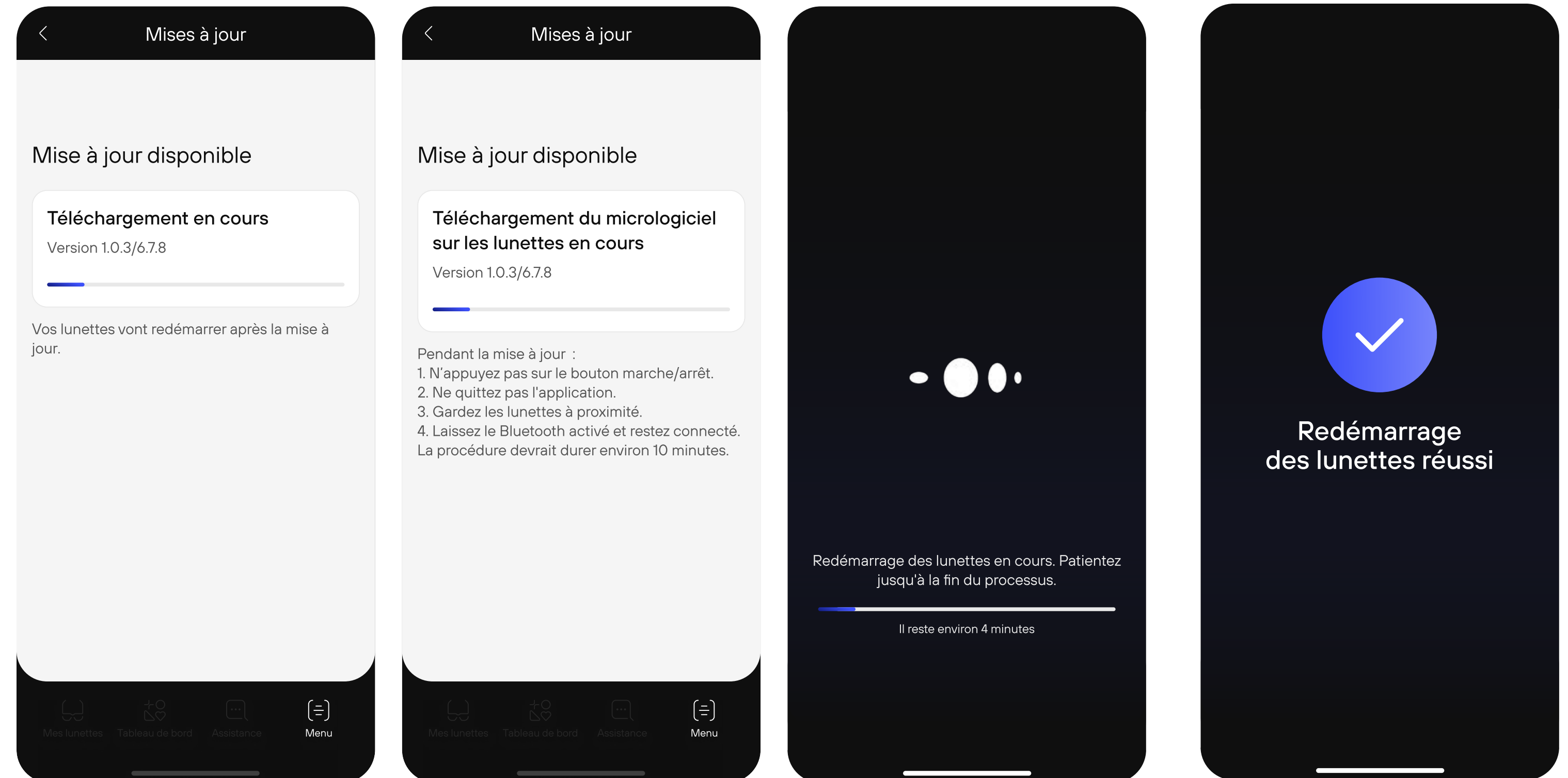



Pour consulter la version la plus récente des instructions d'utilisation,
rendez vous sur

[↗ Consultez les instructions d'utilisation](#)